

ATEX LOURDES

管理医療機器：家庭用エアマッサージ器
ハンドケア コードレス P85

品番

AX-HP285



ハンドケア コードレス

目次





△ 安全上のご注意	1～4	□ 廃棄について	13～14
○ 梱包内容と各部の名称	5	✂ 故障かなと思ったら	15
人 使いかた	6～11	⚙ 仕様	16
🧼 お手入れ	12	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙
📦 保管について	12		

このたびはAX-HP285をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

*デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。


△ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味	表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 禁止を促す記号	
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
 強制を促す記号	

△ 警告

症状について

 **次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。**

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。

 **次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。**

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 心臓に障害のある人
- ・ 温度感覚喪失が認められる人
- ・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・ 糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・ 皮膚に創傷のある人
- ・ 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・ 骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・ 体温38℃以上 (有熱期) の人
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・ その他、医療機関で治療中の人
- ・ けんしょう (腱鞘) 炎の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故や健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児やお子様で使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売元または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

マッサージ部周辺にアクセサリや装飾ネイルなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

手のマッサージ以外の目的で使用しないでください。

けい部(首)へ使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

低温やけどをおこすおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・布団などをかけての使用
- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・ストーブなど暖房器具の近くでの使用

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛い自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。けがの原因になります。

電源について




電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。


感電・ショート・火災の原因になります。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 警告

電源について(つづき)

 電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

 お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
火災やけがの原因になります。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。


使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。


ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。
また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODEL No. SA182V-050200J


他のACアダプターを使用すると故障の原因になります。

異常(故障)について

 故障を発見したときはすぐに使用を中止し、電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

 緊急時や動作中に異常を感じたら、直ちに停止ボタン押して動作を停止してください。
事故やけがの原因になります。

その他

 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。



注意

ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。

この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

手をいれたまま、商品を動かさないでください。
故障や事故の原因になります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。
けがや故障の原因になります。

エアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。
けがや故障の原因になります。

本製品は片手用です。両手を入れて使用しないでください。
事故やけがの原因になります。



使い始めは強さを「弱」で使用してください。
初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用時間は10分以内としてください。1日に複数回使用される場合は時間をあけて3回までにしてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

使い始めは使用時間を5分程度を目処に短くした弱い刺激でご使用ください。
強い刺激のまま使用を続けると、健康を害するおそれがあります。



梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください



- 本体
- ACアダプター
- ビニール手袋 (お試し用)

各部の名称

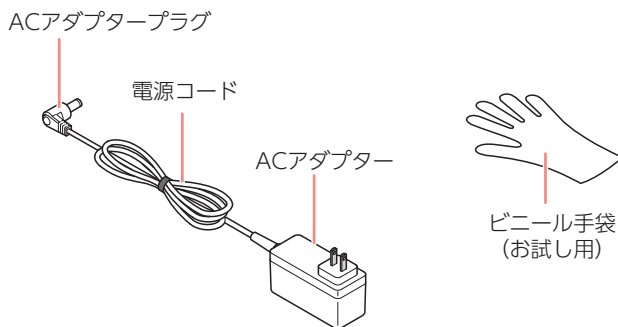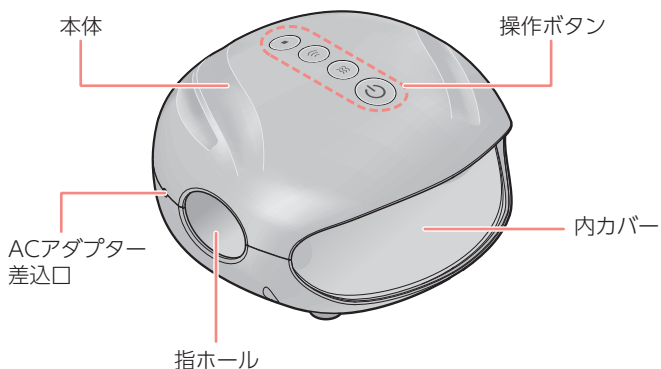

⚠️ 注意 使用前の注意事項


- 使用前に縫製破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に電源ボタンや、停止ボタンなど各ボタン、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。

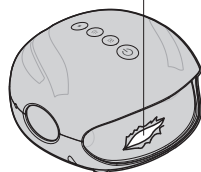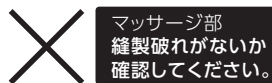

充電する

はじめてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が自己放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。


1

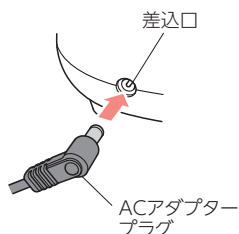

ACアダプターのプラグを 本体のACアダプター差込口に つなぐ

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

2

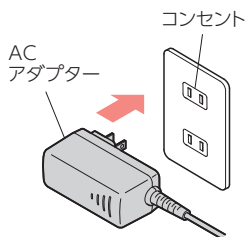

ACアダプターを コンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

電源をつないだ状態でも使用できます。

- コンセントからの電源で動作します。この場合、動作中は充電できません。

3 充電を完了する

電源ボタンが赤色の点滅から点灯になると充電が完了です。




ACアダプターをコンセントからはずし、本体からACアダプタープラグをはずしてご使用ください。

- 約5時間のフル充電で、合計約1.5時間使用できます。
※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
- 充電のしかたによって異なりますが、通常約500回の充電ができます。
※高い周囲温度の中で充電を行うと保護装置が動き、充電が途中で止まる場合があります。
- 充電残量が10%以下になると「電源ボタン」もしくは「ヒーターボタン」のLEDが点滅しますので充電してください。
- 充電せずに充電池を使いすぎるとLEDが「赤点滅」しないときがあります。故障ではありません。そのまま約7分以上、充電を続けると「赤点滅」の充電状態に復帰し、通常の充電完了まで進行します。

マッサージをする


1 本体に手を差し込む

使用したい側の手を差し込み、親指は指ホールに入れ、他の指は指差し込み部にしっかり差し込みます。

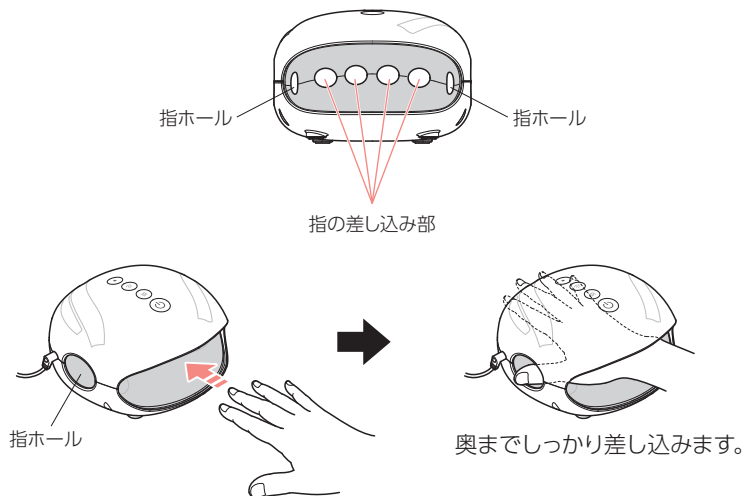


使用例

左手

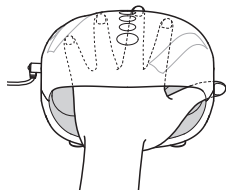

右手

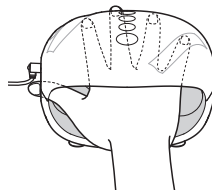


⚠ 注意

- 本体への手の抜き差しは必ず電源がOFFのときにおこなってください。
- 使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。
- 使用中身体に異常がないか十分注意してください。


👤 使いかた

【エアバッグ&その他装備】

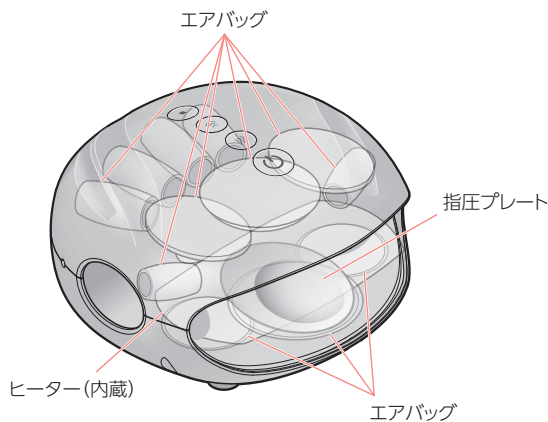

(ビニール手袋の使いかた)

- ビニール手袋をご使用の際にハンドクリーム等をつける場合は、ふだんお使いのものをご使用ください。

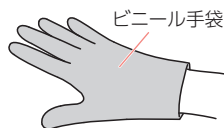

- 付属のビニール手袋は使い捨てタイプのお試し用です。付属のビニール手袋を使い切りましたら、市販のビニール手袋でご使用ください。繰り返しの使用は衛生上、おやめください。
- ※ビニール手袋でご使用中に手が本体から押し出される場合は、本体をもう一方の手でかるく押さえてください。

2

停止ボタン

すべての動作を停止

**強弱ボタン (3段階)**

「弱」：LED 白点灯

「中」：LED 黄点灯

「強」：LED 赤点灯

※スタート時は「弱」です

**ヒーターボタン (3段階)**

「弱」：LED 白点灯

「中」：LED 黄点灯

「強」：LED 赤点灯

**電源ボタン**

「全体コース」：LED 白点灯 初期

「指コース」：LED 黄点灯

「じっくりコース」：LED 赤点灯

電源ボタンを押して マッサージを開始する

電源ボタン(⏻)を長押しすると「全体コース」でマッサージ動作を始めます。

- エアマッサージ、ヒーターはそれぞれ単独で使用でき、同時に使用することもできます。

- エアマッサージ、ヒーターのいずれかが始動して約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に停止します。

※充電残量が10%以下になると「電源ボタン」もしくは「ヒーターボタン」のLEDが点滅しますので充電してください。

マッサージコースを選ぶ

電源ボタン(⏻)を長押しして「全体コース」でマッサージ動作をします。

それ以降は押すたびに「指コース」→「じっくりコース」→電源OFF(くり返し)が切り替わります。



コースの種類

全体コース

全体のエアバッグが圧迫と収縮を繰り返す、血行を促進します。

指コース

指のエアバッグが重点的に動き、こりをほぐします。

じっくりコース

加圧時間を長めに設定。じっくりマッサージし、血行を促進します。


マッサージ強さを選ぶ

マッサージ動作中、強弱ボタン(⊕)でエアの強さを変更できます。
スタート時は弱で動作します。
強弱切替ボタン(⊕)を押すたびに強さが切替わります。



ヒーターを開始する

ヒーターボタン(⊞)を押すたびに、「ヒーター弱」→「ヒーター中」→「ヒーター強」→OFFが切り替わります。
スタート時はヒーターOFFです。

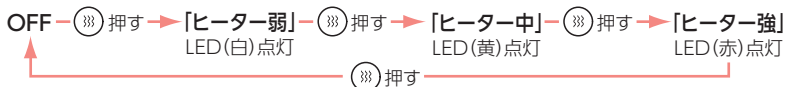

※ヒーターのみでも使えます。

停止する

⊞ を押すとすべての動作が停止します。



お手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてください。
（絶縁劣化防止のため）
- 3ヶ月に一度の目安で充電してください。
（長期間充電しないと、充電池の機能低下・故障の原因となります。）

警告

- 必ず電源が「切」の状態ですべてのACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。



保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。
- お使いにならない場合でも、3ヶ月に一度の目安で充電してください。
（長期間の放置は、充電池の機能低下や故障の原因となります。）

廃棄について

電池の取り出しかたについて

- 本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。



リチウムイオン電池
はリサイクルへ


電池の取り出しかた

- この図は、製品を廃棄するための分解図であり、修理用の図ではありません。


1 ACアダプターをはずし、電源ボタンを押しても動作しない状態を確認する

電池の容量が残っている場合は、電源が切れるまで動作させてください。


2 本体を裏返して、足ゴム4個、ねじ隠しのゴムキャップ4箇所を外す

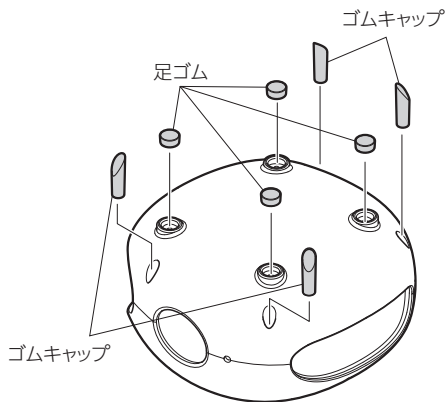

3 トルクドライバー(T10)でねじ(8本)を外し、ケース(底)を外す

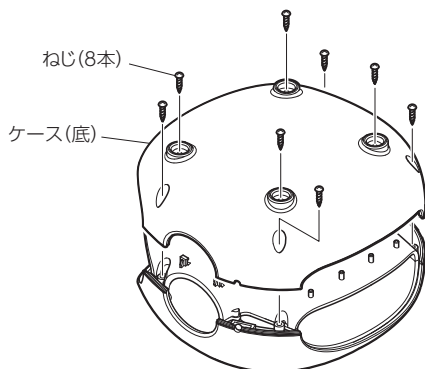

4 電池のコードを1本ずつ切る

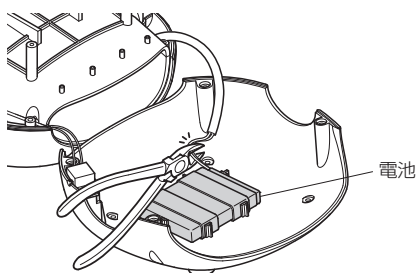

⚠ 注意

- 必ず1本ずつ切ってください。
3本をまとめて切るとショートする場合があります。
- 必ず本体からACアダプターを取りはずして分解してください。
- 充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使いきってください。

🔧 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	充電容量が少なくなっている可能性がありますので、付属のACアダプターを使って充電してください。
	操作ボタンは正しく動作していますか？
運転中に停止した	スイッチを押してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 スイッチを押すと運転を再開します。
異音がる音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
ヒーターが暖かくない	低温やけどを防止するため、本品のヒーターはほんのりと暖くなる程度に設定しています。冬季は暖かさを感じにくい場合がありますが故障ではありません。
充電できない	ACアダプターを正しくつないでいますか？(P.7参照)
	長期間保管し、電池が放電しきっていませんか？ 完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電してください。
	高温時や低温時は充電できないことがあります。 常温の場所で充電してください。

⚠️ 警告

- 絶対に分解したり修理改造は行わないでください。
異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用エアマッサージ器 (JMDNコード 34663000)
販売名	ハンドケア コードレス P85
商品番号	AX-HP285
医療機器認証番号	305AABZX00033000
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50/60Hz 10W (ヒーター 3W)
ACアダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.4A 出力 DC5V 2A
タイマー	10分自動オフ
製品サイズ	(約) W175×L175×H115mm
製品重量	約800g
素材	本体：ABS樹脂 内カバー：ポリウレタン、ナイロン
ヒーター最高温度	約45℃以下
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス



A series of 15 horizontal dashed red lines spaced evenly down the page, serving as a guide for handwriting practice.

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ハンドケア コードレス」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	ハンドケア コードレス / AX-HP285					
お買上げ年月日*	年	月	日	保証期間	お買上日より1年	本体
* お客様	お名前		様	* 販売店		
	ご住所					
	TEL:() -					

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



株式会社アテックス
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス
0120-486-505

受付時間 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

