

ATEX TOR

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器
マッサージソファ D10

品名

マッサージソファ KOYOI

品番

AX-HD410

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解



目次





⚠ 安全上のご注意 ……1～4	📁 保管について ……21
🔍 各部の名称 ……5～6	🔧 故障かなと思ったら ……21
👤 使いかた ……7～19	⚙️ 仕様 ……22
🧼 お手入れ ……20	💖 保証とアフターサービス ……裏表紙

このたびはAX-HD410をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味	表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。	
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 禁止を促す記号
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。	 強制を促す記号

⚠ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む。) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・ 温度感覚喪失が認められる人
- ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 心臓に障害のある人
- ・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・ 背骨 (脊椎) に異常のある人や曲がっている人
- ・ 糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・ 皮膚に創傷のある人
- ・ 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・ 骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・ 体温38℃以上 (有熱期) の人
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・ その他、医療機関で治療中の人
- ・ けんしょう (腱鞘) 炎の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

事故や健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。
カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。

マッサージ部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

頭、顔、のど、胸部には使用しないでください。
事故やけがのおそれがあります。

首周辺をマッサージする時は、マッサージ部の動きに注意してください。また、首の前方はマ
ッサージしないでください。
事故や体調不良の原因になります。

使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
事故やけがのおそれがあります。

もみ玉面に勢いよく身体を当てないでください。
けがの原因になります。

動作中、マッサージ部に手や指を差し込まないでください。
けがの原因になります。

マッサージ器に身体を強く当てすぎないでください。
負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。



カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売元または製造販売元に連絡して
ください。
事故やけがの原因になります。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 警告

電源について

⊘ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

ぬれた手で本体や電源コードには触れないでください。感電・事故の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因になります。

電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。火災やけがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。

停電の時はすぐに電源を切ってください。感電やけがの原因になります。

異常(故障)について

⊘ 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。事故やけがの原因になります。

⚠ 緊急時や動作中に異常を感じたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。事故やけがの原因になります。

その他

⊘ 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 注意

ご使用について

⊘ 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。感電や故障の原因になります。

この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。故障や事故の原因になります。



本体に強い衝撃や荷重を与えないでください。
故障や事故の原因になります。

もみ玉に故意に力を加えて無理に止めないでください。
けがや事故の原因になります。

投げたり、落としたりしないでください。
破損や故障の原因になります。

本体の上に立ったり、フットレストに座らないでください。
事故や故障の原因になります。

低温やけどをおこすおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。
・熱すぎると感じた場合は背中ヒーターは使わない。

「低温やけど」について

比較的低い温度（40℃～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。



使い始めは5分程度をめに弱いマッサージとなるよう当り方に注意してください。
初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用は15分以内とし、1日の使用は1日2回、30分以内を目処にご使用ください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

マッサージの刺激が強すぎると感じた時は、弱く当ててください。
強い刺激のまま使用を続けると、健康を害するおそれがあります。

同一箇所への連続使用は避けてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

本品に大きな荷重がかかるような使い方をすると、保護装置が作動し、動作が止まる場合があります。
停止した場合は、しばらく本体を休ませて（1時間程度）から再度動作させてください。

使用後は、背もたれ部を完全に起こしてください。
けがや事故の原因になります。

各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください


- 本体
- 電源コード
- コントローラーホルダー
- 取扱説明書

各部の名称

本体

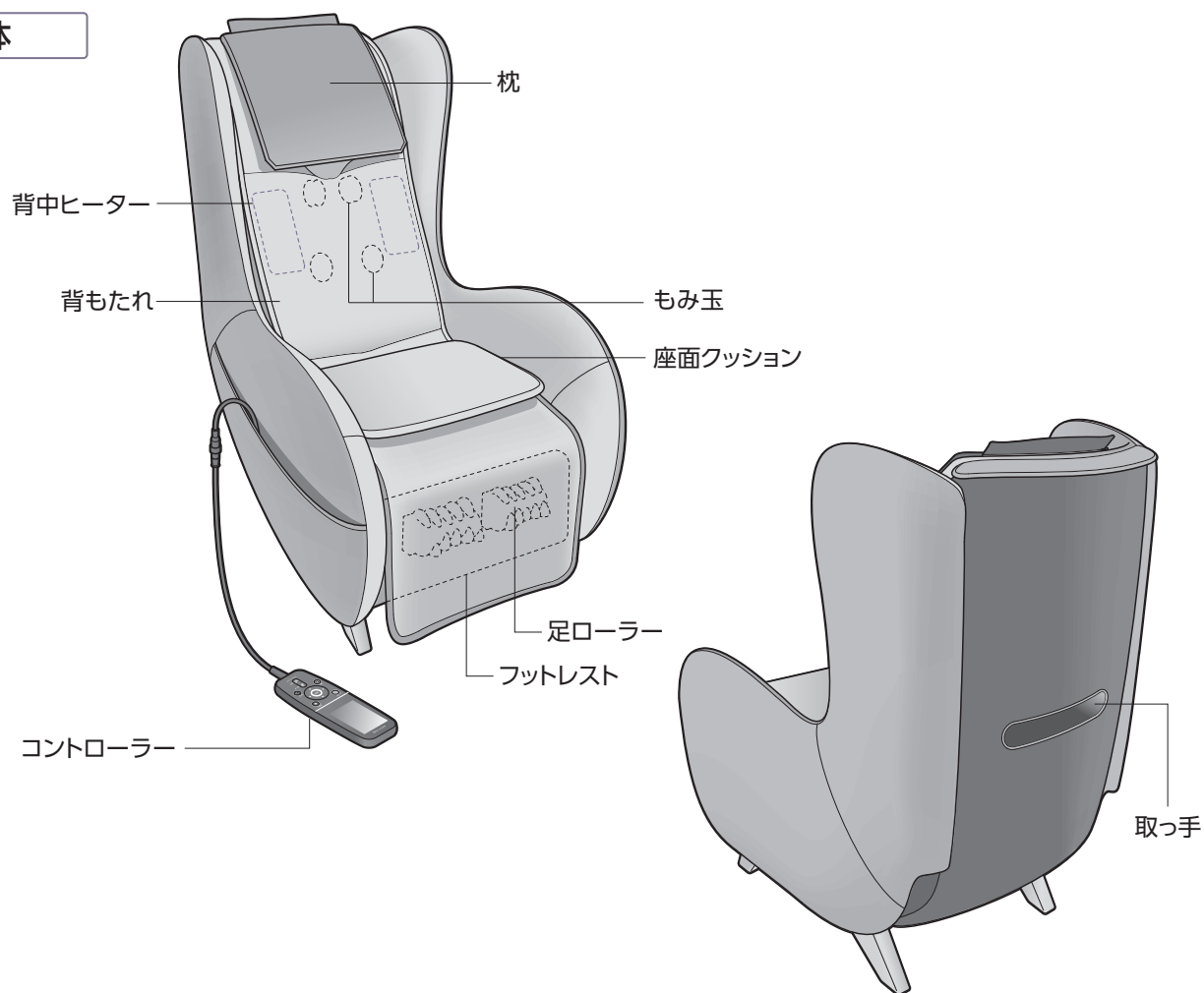

付属品

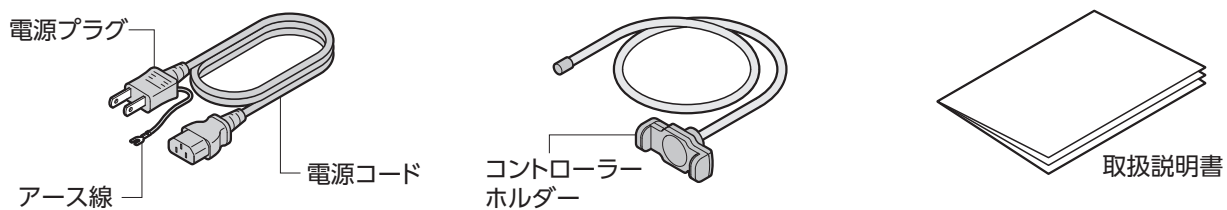


コントローラー

ボタン操作の詳細は「使い方」ページで必ずご確認ください。




コントローラーホルダーの取付け

1 コントローラーホルダーのホース部の先端を本体のポケットの形状に沿わずように曲げる

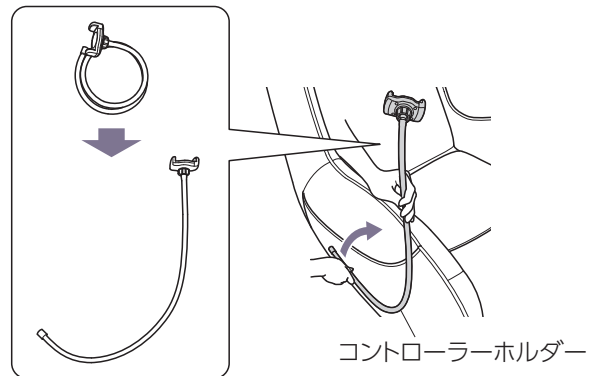


2 本体のポケットに差し込む

※コントローラーの配線の仕様上、右側のポケットでしか使用できません。

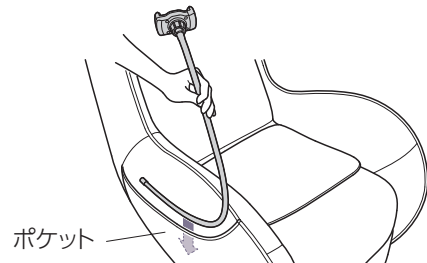

3 ホルダー部にコントローラーをはさむ

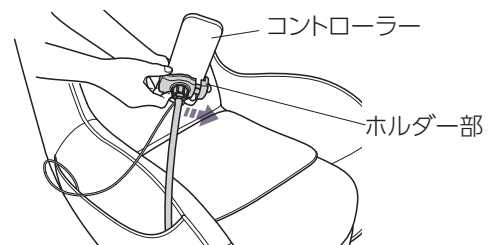


👤 使いかた

使用前の準備 (設置)

移動のしかた

2人以上で持ち上げて移動する

ひとりが背もたれ背面の取っ手を持ち、もうひとりが側面パネルの下部を持って移動します。

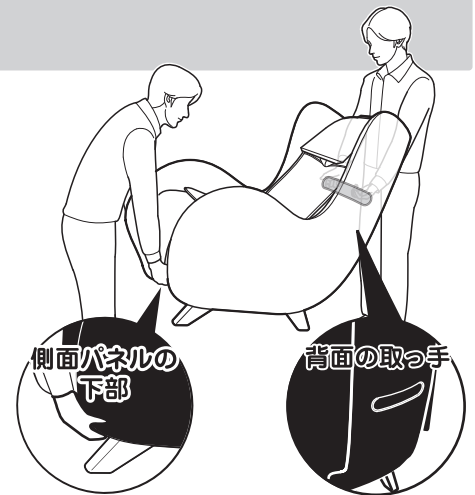

⚠️ 注意

- 移動する場合は、必ず2人以上で運んでください。故障やけがの原因になります。
- ゆっくり慎重に運んでください。
- 足元に十分注意して、ゆっくりと下ろしてください。
- たたみや床を傷つけることがありますので、本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。
- 直射日光が毎日長時間あたるところや、暖房器具の近くなど、高温になるところへの設置は避けてください。(表面素材が変色したり、変質する原因)


移動時のお願い

本体重量は約49kgです。
必ず2人以上で行ってください。

- ・重量物なので、移動時には腰などを傷めないようにご注意ください。
- ・足もとに気をつけながら、ゆっくりと下ろしてください。
- ・持ち運び時は指定の箇所をしっかりとお持ちください。


設置のしかた

- 1 周囲にリクライニングできるスペースがあり、水平なところに設置する

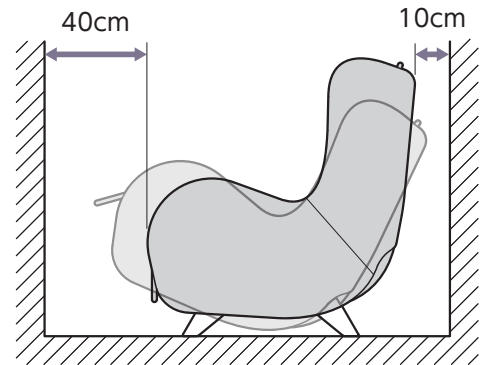


- 2 インレット部に電源コードを差し込む

※本体側のインレット部に電源コードが確実に差し込まれているか確認してください。

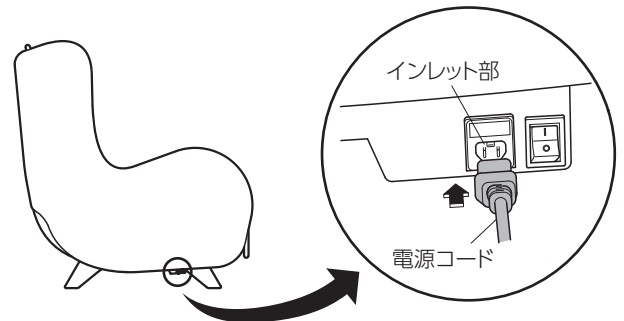

- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

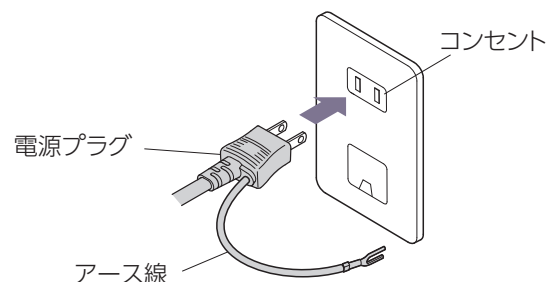

アースの取付けかた


万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

①コンセントにアース端子がある場合

電源プラグから出ているアース線を、コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。

②コンセントにアース端子がない場合


お買い上げの販売店にご相談ください。

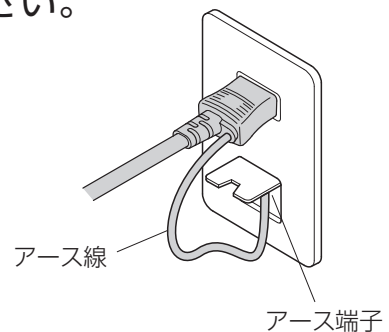

電源コードは、必ず本体に付属のものをご使用ください。
電源コードのプラグ部にアース栓がついていないものは、万一の感電を防ぐことが出来ませんので絶対に使用しないでください。

3 主電源を入れる

主電源スイッチの I 側を押すと電源が入ります。

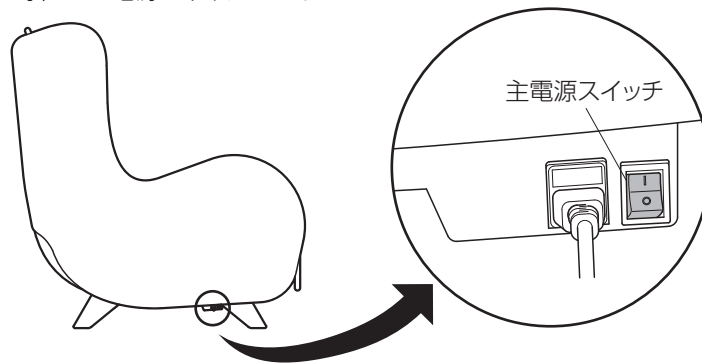


※長時間使用しないときは電源ボタンの O 側を押して電源を切ってください。

⚠️ ご注意 使用前の注意事項

- 使用前に生地破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前にコントローラーの各ボタンや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。
- 商品に大きな荷重がかかるような使い方をすると、保護装置が作動し動作が止まる場合があります。停止した場合は、しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作させてください。

マッサージ部


生地破れがないか
確認してください。

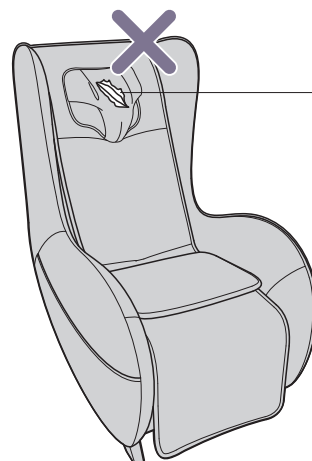

主な機能

マッサージコース

自動コース (P10～) あらかじめ設定された4つのコースからお好みに応じてお選びいただけます。

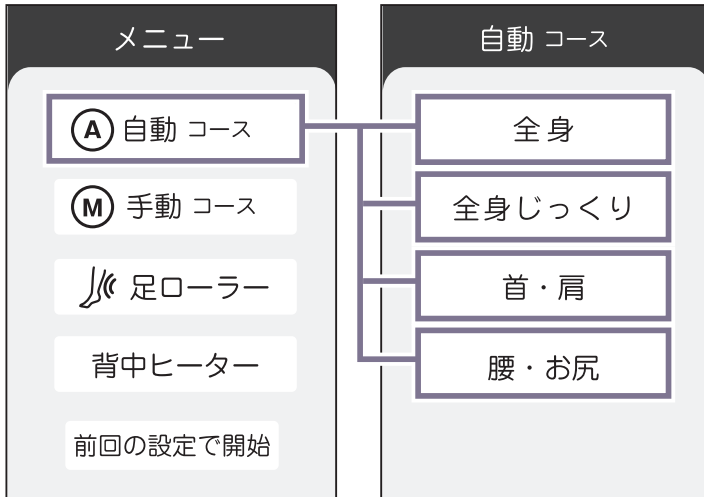

全身

約5分で首～肩～背中～腰～お尻～お尻下の全身をバランス良くマッサージします。これを3回繰り返します。

全身じっくり

「首・肩」「背中・腰」「お尻・お尻下」の3箇所それぞれを約5分ずつマッサージします。


首・肩

首～肩を重点的にマッサージします。

腰・お尻

腰～お尻～お尻下を重点的にマッサージします。

手動コース (P12～) 5つの手技モードを自分好みで調節できるコースです。

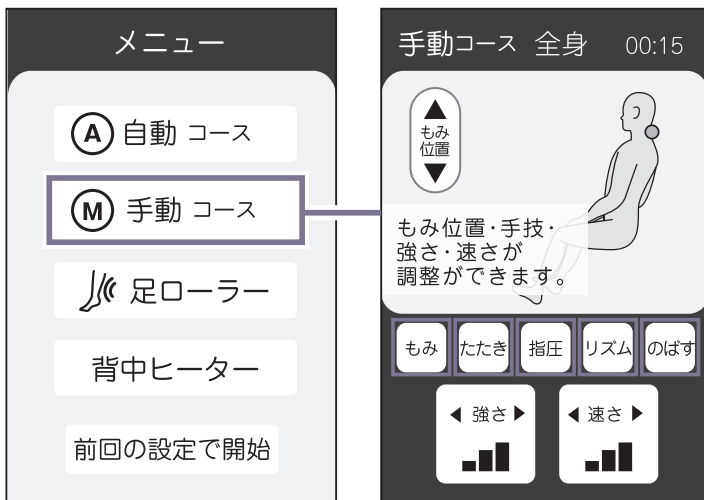

もみ

もみ動作により、全身を優しくもみほぐします。

たたき

たたき動作により、筋肉のこりを優しくほぐします。

指圧

強弱コントロールによる指圧感覚で、全身を力強くマッサージします。


リズム

小刻みなバイブレーション振動により、波動のような感覚でもみほぐします。

のばす

身体をしっかりとかまなく伸ばします。

足ローラー・背中ヒーター (P15～)

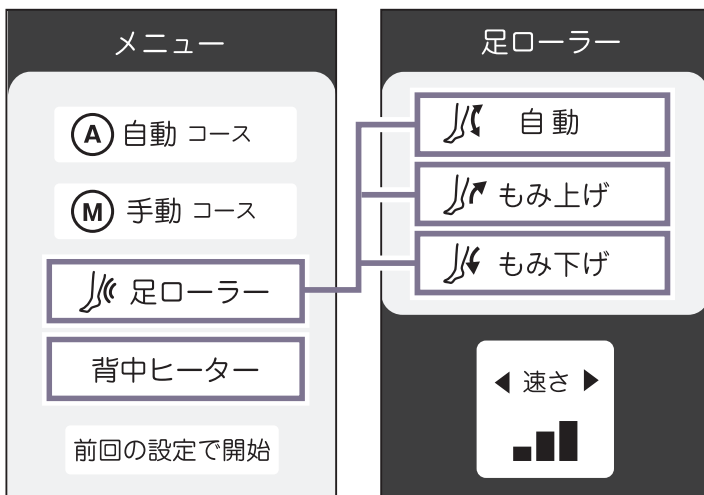

足ローラー

フットレストに内蔵された足ローラーにより、ふくらはぎを快適にもみほぐして足の疲れを癒します。リクライニング時のフットレストは最適な角度設定になっており、楽な姿勢で足ローラーをお使いいただけます。


ローラー回転方向：自動・もみ上げ・もみ下げの3つから選択できます。

ローラー速さ：3段階で調節できます。

背中ヒーター


背中を温めます。

自動コースでマッサージする

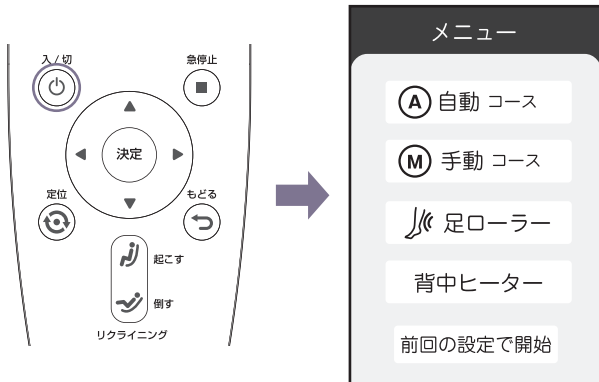

1 電源ボタン (⏻) を押す

電源が入り、「メニュー画面」が表示されます。

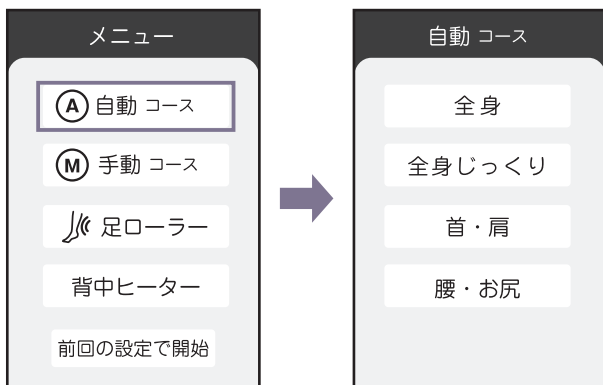


2 自動コースを選択する

方向キー (⬆️) で「自動コース」を選び、決定 (決定) を押します。

表示画面が「自動コース」に切り替わります。

※「自動コース」使用中の場合は、「もどる」ボタンで後から「足ローラー」、「背中ヒーター」を選ぶことができます。

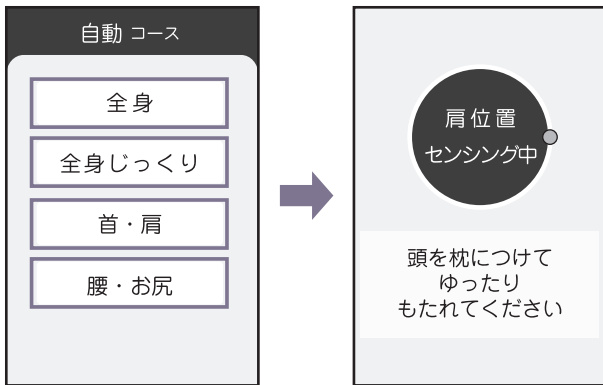

3 4種類のコースから好みのコースを選択する

方向キー (⬆️) で[全身][全身じっくり][首・肩][腰・お尻]からお好みのコースを選び、決定 (決定) を押します。

わずかにリクライニングしたのちに肩位置センシングが開始されます。

※各コースの詳細についてはP.9「主な機能」を参照してください。

▶表示画面に「肩位置センシング中」が表示され、肩検知がスタートします。





⚠️ 注意

- センシング中は頭を背もたれにつけて座ってください。



▶しばらく待つとセンシングが完了し「センシング完了」画面が表示されます。

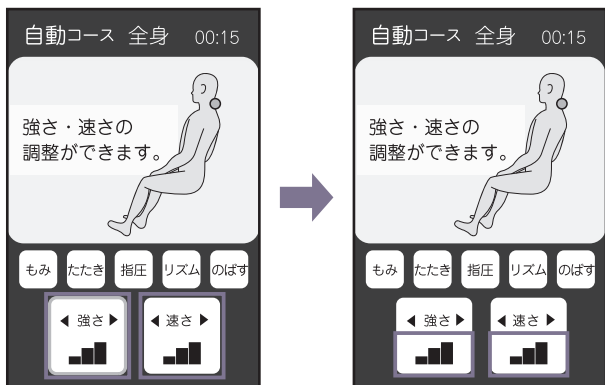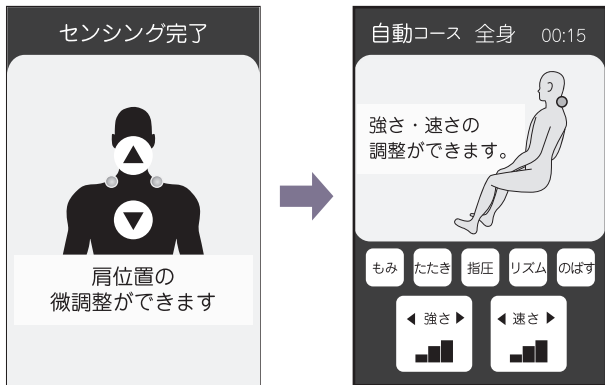

※動作中のコースから別のコースに変更した際は、タイマー時間はリセットされず、引き継がれます。

使いかた



4 肩位置を調整する





「センシング完了」画面で方向キー  を使ってもみ玉の位置を調整し、決定  を押します。

※方向キー  から手を離すと、決定  を押さなくても約7秒後にマッサージがスタートします。

▶「自動コース」画面が表示され、マッサージがスタートします。

自動コースの動作中は、強さ・速さを調整できます。

調整のしかた


1. 「各コース」画面で「強さ」、または「速さ」を選択する方向キー  で調整する項目を選び、決定  を押します。
 2. お好みの「強さ」、または「速さ」に調整する方向キー  で三段階から調整し、決定  を押します。
- ※「強さ」または「速さ」の外ワクが赤から黄色になると調整が可能になります。

「足ローラー」「背中ヒーター」「リクライニング」と同時に使用できます。

「自動コース」使用中に「足ローラー」「背中ヒーター」「リクライニング」機能を使用することができます。

各機能の操作方法は、P.15「足ローラー」、P.17「背中ヒーター」、P.19「リクライニング」を参照してください。

※タイマーは「自動コース」の時間（15分）で同時に終了します。

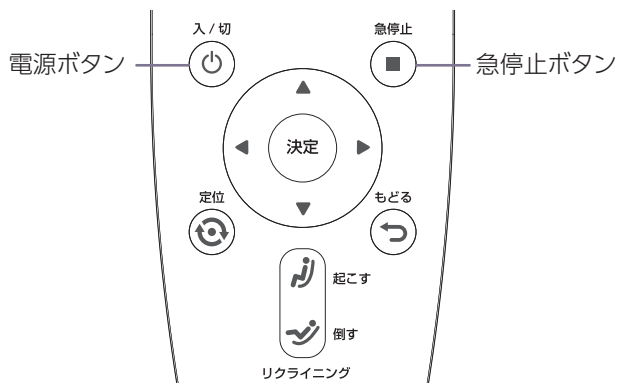


5 終了する

マッサージ開始から15分で自動的に終了します。

ただちに停止したいとき

急停止ボタン  を押す

もみ玉は現在の位置で停止します。

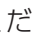※リクライニング角度を元の位置に戻す場合は、再度電源ボタン  を押してください。


途中で終了するとき

電源ボタン  を押す




リクライニングが元の位置に戻り、もみ玉が上部まで移動して電源が切れます。

本体の電源を切るとき

1. 本体の右側下の主電源スイッチを切る
主電源スイッチの○側を押します。
2. 電源プラグをコンセントから抜く

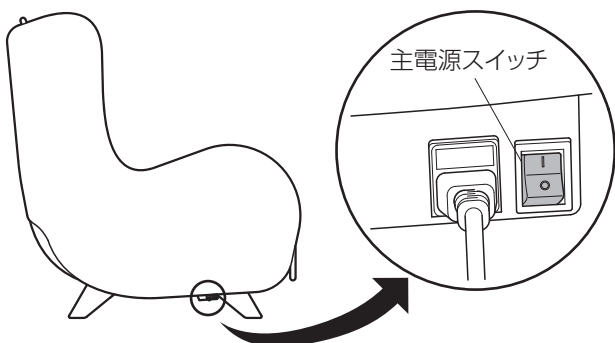

手動コースでマッサージする

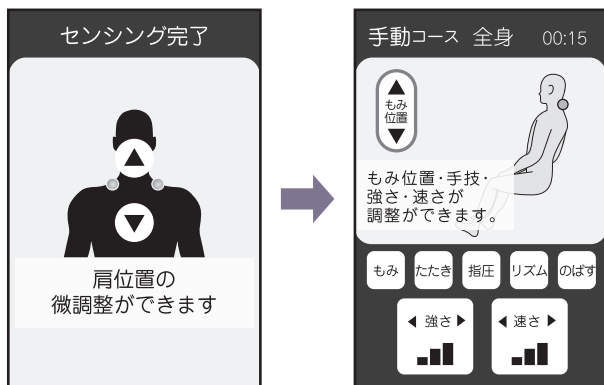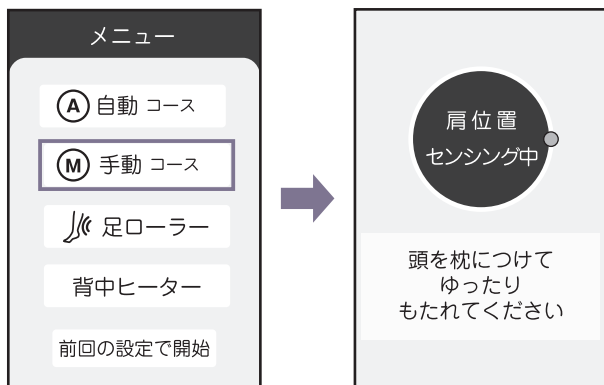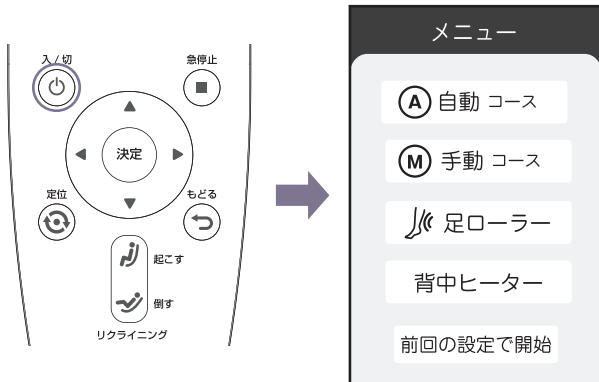

1 電源ボタン (⏻) を押す

電源が入り、「メニュー画面」が表示されます。

2 手動コースを選択する

方向キー (⬆️) で「手動コースを選び、決定 (決定) を押します。

わずかにリクライニングしたのちに肩位置センシングが開始されます。

▶表示画面に「肩位置センシング中」が表示され、肩検知がスタートします。

⚠️ 注意

- センシング中は頭を背もたれにつけて座ってください。

▶しばらく待つとセンシングが完了し「センシング完了」画面が表示されます。

3 肩位置を調整する

「センシング完了」画面で方向キー (⬆️) を使ってもみ玉の位置を調整し、決定 (決定) を押します。

※方向キー (⬆️) から手を離すと、決定 (決定) を押さなくても約7秒後にマッサージがスタートします。

▶「手動コース」画面が表示され、[もみ]でマッサージがスタートします。



4 5種類の手技モードからお好みの手技を選択する

方向キー で[もみ][たたき][指圧][リズム][のぼす]から、使いたい手技を選び、決定 を押します。

※決定 を押すと色が変わります。

※各手技の詳細についてはP.9「主な機能」を参照してください。

▶選択した手技がスタートします。

手動コースの動作中は、強度・速度を調整でき、もみ玉位置を固定してマッサージをおこなう定位機能も使用できます。

調整のしかた

1. 「手動コース」画面で「強度」、または「速度」を選択する
方向キー で調整する項目を選び、決定 を押します。
2. お好みの「強度」、または「速度」に調整する
方向キー で三段階から調整し、決定 を押します。
※「強度」または「速度」の外ワクが赤から黄色になると調整が可能になります。

定位機能の使いかた


1. 定位ボタン を押す
▶もみ玉の移動が止まります。
▶「手動コース」画面に「もみ位置」が表示されます。
2. 方向キー で を選択して決定 を押す
3. 方向キー で上下位置を調整する
▶ボタンから手を離すと、その位置でマッサージを続けます。
※調整した位置で各手技の動作をおこないますが、[のぼす]を選択しているときは上下約30cmの範囲で動作します。
4. お好みの手技に変更する
方向キー でお好みの手技を選び、決定 を押します。
5. 定位機能を解除する
再度定位ボタン を押します。
▶定位機能が解除されもみ玉が上下に移動します。

「足ローラー」「背中ヒーター」「リクライニング」と同時に使用できます。

「手動コース」使用中に「足ローラー」「背中ヒーター」「リクライニング」機能を使用することができます。

各機能の操作方法は、P.15「足ローラー」、P.17「背中ヒーター」、P.19「リクライニング」を参照してください。

※タイマーは「自動コース」の時間(15分)で同時に終了します。

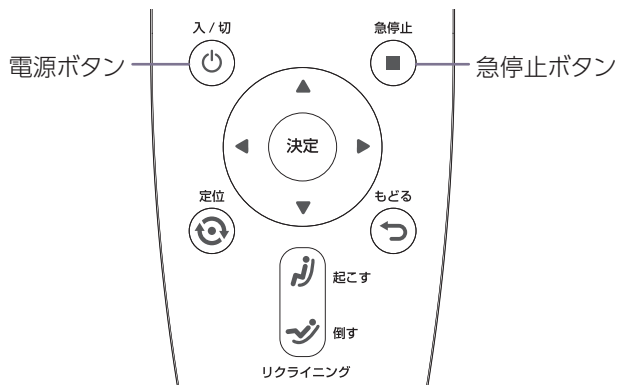

5 終了する

マッサージ開始から15分で自動的に終了します。

ただちに停止したいとき

急停止ボタン (■) を押す

もみ玉は現在の位置で停止します。

※リクライニング角度を元の位置に戻す場合は、再度電源ボタン (⏻) を押してください。


途中で終了するとき

電源ボタン (⏻) を押す

リクライニングが元の位置に戻り、もみ玉が上部まで移動して電源が切れます。




本体の電源を切るとき

1. 本体の右側下の主電源スイッチを切る
主電源スイッチの○側を押します。
2. 電源プラグをコンセントから抜く

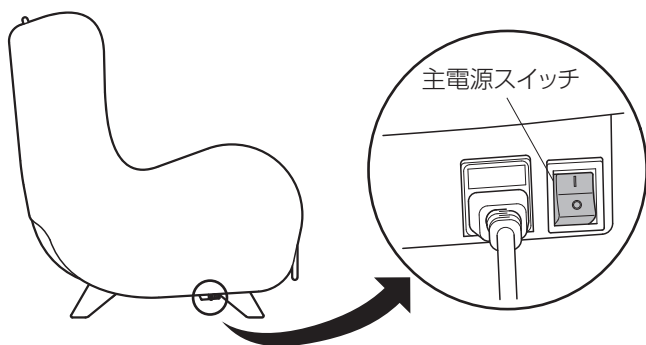

足ローラーを使う

足ローラーは単独でも、お使いいただけます。

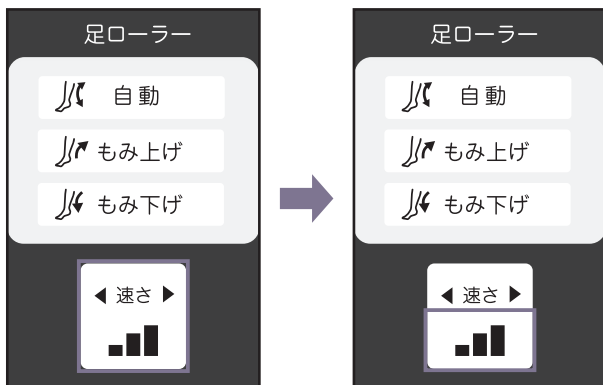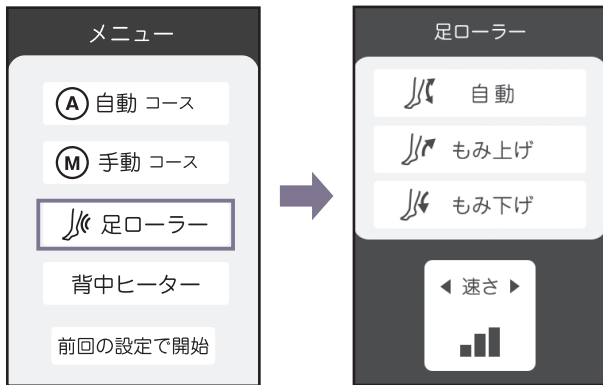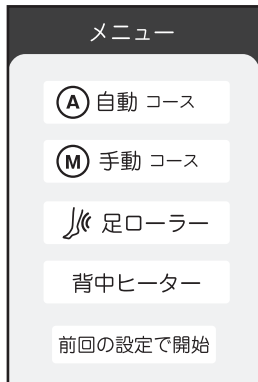

1 「メニュー画面」を表示する

電源が切れているときは、
電源ボタン (⏻) を押します。

自動コース、または手動コースをご使用中のときは、
戻るボタン (⏪) を押します。

2 足ローラーを選択する

方向キー (⬆️) で「足ローラー」を選び、
決定 (⏹) を押します。

▶ 「足ローラー」画面が表示されます。

3 足ローラーの動作を選択する

方向キー (⬆️) で足ローラーの動作を[自動][もみ上げ]
[もみ下げ]から選び、決定 (⏹) を押します。


▶ 足ローラーがスタートします。

足ローラー開始後15分で自動停止します。ただし
マッサージと同時に使用するときにはマッサージの
タイマーが優先されます。

4 速さを調節する

方向キー (⬆️) で「足ローラー」画面から速さを選び、
決定 (⏹) を押します。

方向キー (⬆️) で三段階からお好みの速さに調整し、
決定 (⏹) を押します。

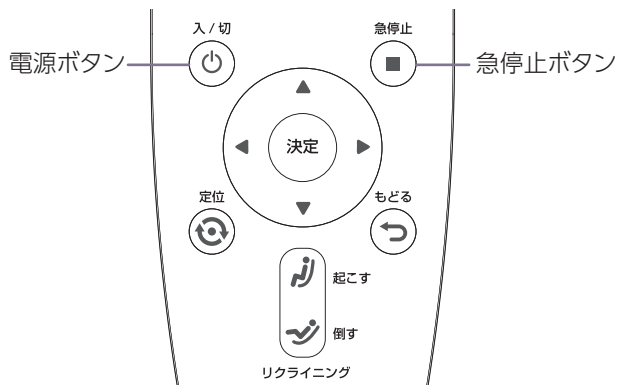

5 終了する

足ローラー開始後15分、または使用中のマッサージコースの終了で自動的に終了します。

ただちに停止したいとき

急停止ボタン (■) を押す

もみ玉は現在の位置で停止します。

※リクライニング角度を元の位置に戻す場合は、再度電源ボタン (⏻) を押してください。


途中で終了するとき

電源ボタン (⏻) を押す

リクライニングが元の位置に戻り、もみ玉が上部まで移動して電源が切れます。





本体の電源を切るとき

1. 本体の右側下の主電源スイッチを切る
主電源スイッチの○側を押します。
2. 電源プラグをコンセントから抜く

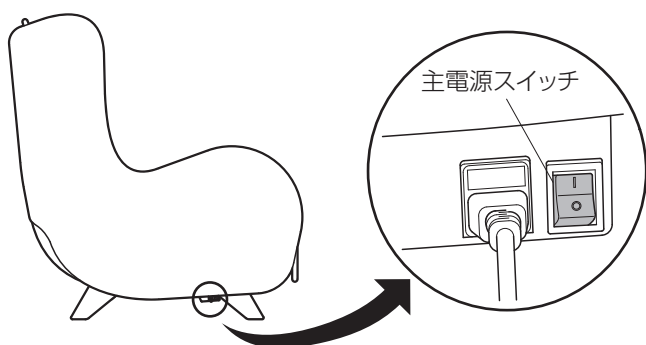

背中ヒーターを使う

背中ヒーターは単独でもお使いいただけます。

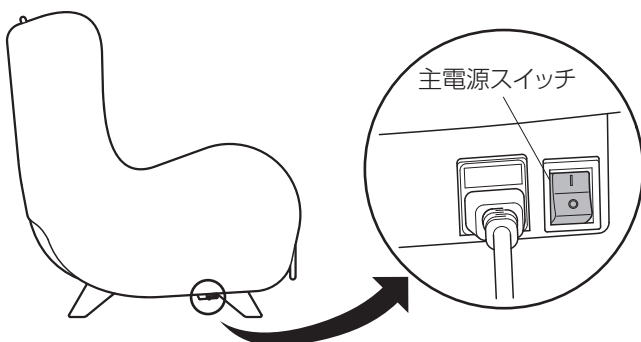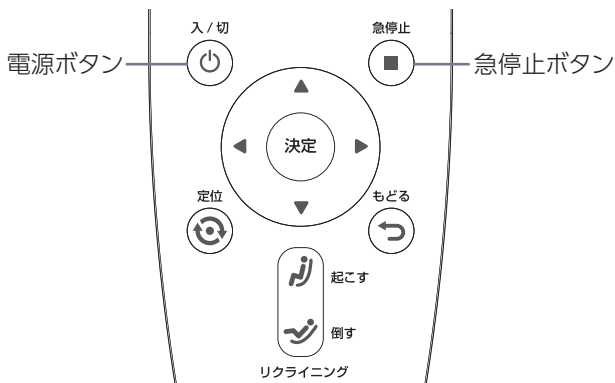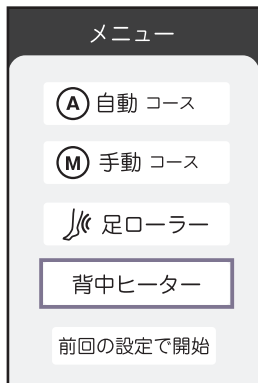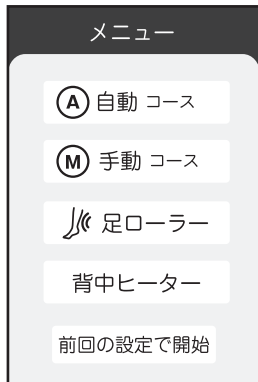

1 「メニュー画面」を表示する

電源が切れているときは、

電源ボタン (⏻) を押します。

自動コース、または手動コースをご使用中のときは、

戻るボタン (⏪) を押します。

2 背中ヒーターを選択する

方向キー (⬆️) で「背中ヒーター」を選び、

決定 (決定) を押します。

▶ 背中ヒーターが起動します。

背中ヒーター開始後30分で自動停止します。

背中ヒーターのタイマーは独立しているため、
マッサージと同時に使用したとき、マッサージ
終了後も背中ヒーターは継続します。

3 終了する

背中ヒーター開始後30分で自動的に終了します。

ただちに停止したいとき

急停止ボタン (■) を押す

もみ玉は現在の位置で停止します。

※リクライニング角度を元の位置に戻す場合は、再度

電源ボタン (⏻) を押してください。

途中で終了するとき

電源ボタン (⏻) を押す

リクライニングが元の位置に戻り、もみ玉が上部まで
移動して電源が切れます。


本体の電源を切るとき

1. 本体の右側下の主電源スイッチを切る

主電源スイッチの○側を押します。

2. 電源プラグをコンセントから抜く


前回と同じ設定で使う

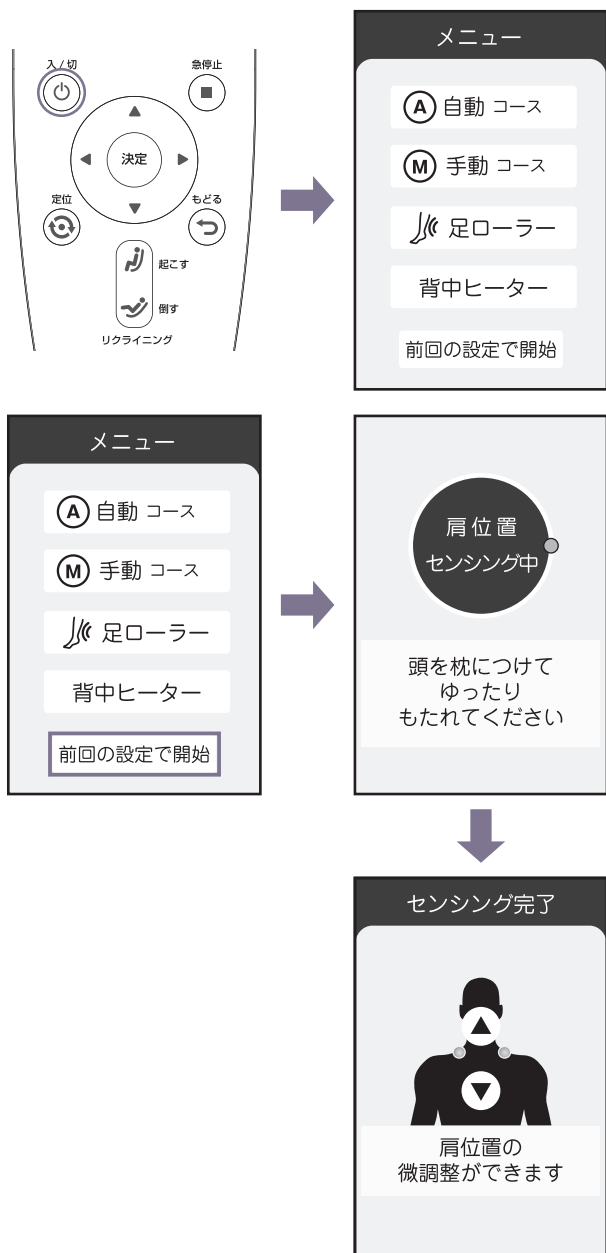

1 電源ボタン (⏻) を押す

電源が入り、「メニュー画面」が表示されます。

2 前回の設定で開始を選択する

方向キー  で「前回の設定」で開始を選び、決定 (決定) を押します。


▶表示画面に「肩位置センシング中」が表示され、肩検知がスタートします。

⚠ 注意


- センシング中は頭を背もたれにつけて座ってください。

▶しばらく待つとセンシングが完了し「センシング完了」画面が表示されます。

3 肩位置を調整する


「センシング完了」画面で方向キー  を使ってもみ玉の位置を調整し、決定 (決定) を押します。

わずかにリクライニングしたのちに肩位置センシングが開始されます。

※方向キー  から手を離すと、決定 (決定) を押さなくても数秒経過したあとにマッサージがスタートします。

▶前回使用したコース、強さ、速さでマッサージを開始します。


リクライニング機能を使う

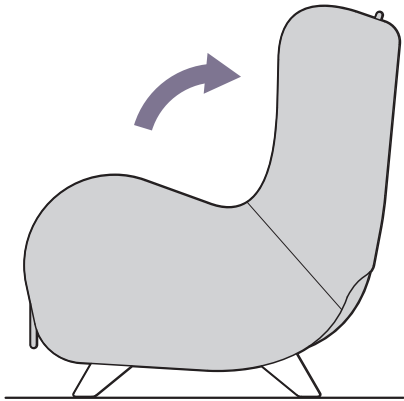

1 背もたれを倒す

リクライニングボタン  の[倒す]を押します。

- ▶ ボタンを押しているあいだ、背もたれが後側にリクライニングします。

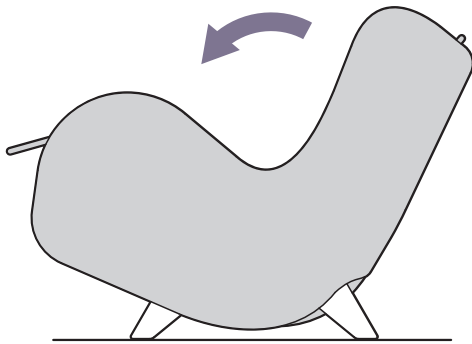

2 背もたれを起こす

リクライニングボタン  の[起こす]を押します。

- ▶ ボタンを押しているあいだ、背もたれが前側にリクライニングします。

⚠ 注意

- 使用後は必ずリクライニングと脚部の角度を戻してください。




お手入れ

⚠ 警告

●必ず電源が「切」の状態です電源コードのプラグをコンセントから抜いて行ってください。


- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯ですすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてください。
（絶縁劣化防止のため）

枕のお手入れ

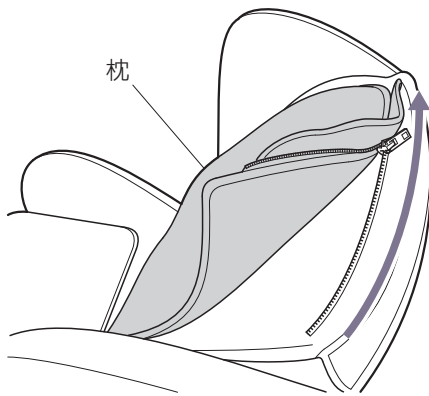

- 1 枕のファスナーを開けて、本体からはずす
- 2 枕に縫い付けてある洗濯絵表示にしたがって洗う
- 3 しわをのばし形を整えてから、日陰に干す
- 4 乾いたら、枕のファスナーを閉じて、本体に取り付ける

座面クッションのお手入れ

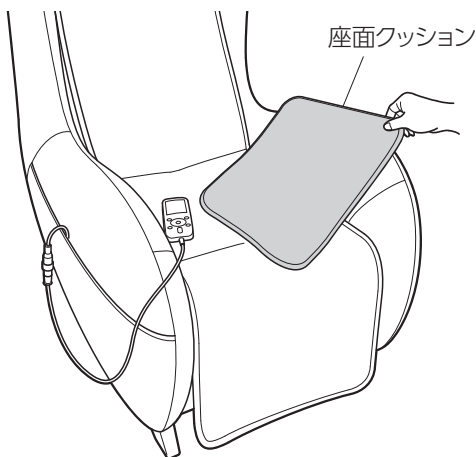

- 1 座面クッションに縫い付けてある洗濯絵表示にしたがって洗う
- 2 日陰に干す
- 3 乾いたら本体に取り付ける

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 保管の際は、製品に異常がないか定期的に点検してください。
- 長期間ご使用にならないときは、できるだけ常温(10℃～30℃)で保管ください。
- コード類はねじれをほどこいて保管ください。
- 廃棄の際は必ず各都道府県・市町村の指示にしたがってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。

動かない	電源プラグが抜けていませんか？ →電源コードのプラグが、ご家庭のコンセントに確実に差し込まれているかを確認し、もう一度操作をしてください。
	操作ボタンは正しく動作していますか？ →P.9～19の「使いかた」を再度ご確認ください。
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか？ →保護装置が作動しモーターが止まる場合があります。しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください。
	マッサージ動作を始めてから、約15分(背中ヒーターは約30分)経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。電源ボタンを押すと運転を再開します。
動作中に音がする 音が大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

警告

- 絶対に分解したり修理改造は行わないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。



仕様

類別	機械器具
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	マッサージソファ
商品番号	AX-HD410
医療機器認証番号	306AKBZX00004000
電気定格	AC100V 50W (ヒーター 12.5W)
タイマー	自動コース、手動コース、足ローラー：15分自動オフ、背中ヒーター：30分自動オフ
製品サイズ	通常時：W65 × L105 × H110cm リクライニング時：W65 × L145 × H93cm
リクライニング角度	約115度～135度
製品重量	約49kg
外装張地	ポリエステル素材
もみ回数	最小約9回/分、最大約18回/分
もみ幅	最小約4.5cm、最大約12.5cm
たたき回数	最小約270回/分、最大約380回/分
リズム回数	最小約420回/分、最大約540回/分
足ローラー	最小26回/分、最大38回/分
移動速度	最小約2cm/秒、最大約3cm/秒
背中ヒーター温度	約45℃
生産国	中国
製造業者	XIAMEN HEALTHCARE ELECTRONIC CO.,LTD. (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「マッサージソファ / AX-HD410」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低6年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 品番	マッサージソファ / AX-HD410		
お買上げ年月日 *	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所		
	TEL: () -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.


※【ご相談窓口における個人情報の取扱いについて】
株式会社アテックスおよび関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。またご相談内容は録音させていただく場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の取扱いの詳細については、
<https://www.atex-net.co.jp/privacypolicy/>をご参照ください。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社アテックス
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 福岡物流センター
〒830-0222 福岡県久留米市城島町青木島438-1

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは
カスタマーサービス

 0120-486-505

受付時間 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)