

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号

ATEX LOURDES

管理医療機器：家庭用エアマッサージャー
フットマッサージャー P61

品番

AX-HP361



レッグマッサージャー
スッキリブーツ

目次

△ 安全上のご注意 ……………	1 ～ 4	□ 廃棄の時の充電池の取り出しかた ……	12
○ 梱包内容と各部の名称 ……………	5	✂ 故障かなと思ったら ……………	13
人 使いかた ……………	6 ～ 10	⚙ 仕様 ……………	14
✋ お手入れ ……………	11	♡ 保証とアフターサービス ……	裏表紙
📦 保管について ……………	11		

このたびはAX-HP361をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

※本書はアテックスホームページよりダウンロードできます。

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

・医師からマッサージを禁じられている人

例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人

・悪性腫瘍のある人

・心臓に障害のある人

・温度感覚喪失が認められる人

・妊娠初期の不安定期または出産直後の人

・背骨 (脊椎) に異常のある人や曲がっている人

・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人

・皮膚に創傷のある人

・安静を必要としている人や体調がすぐれない人

・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人

・体温38℃以上 (有熱期) の人

例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき

・その他、医療機関で治療中の人

・けんしょう (腱鞘) 炎の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

事故や健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。

カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売元または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

マッサージ部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

足以外には使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。

事故・感電・低温やけどのおそれがあります。

動作中、マッサージ部に手や指を差し込まないでください。

けがの原因になります。

本商品はリチウム電池を使用しています。次のようなことは絶対しないでください。

- ・加熱や火中投下
- ・高温環境での使用、充電、放置
- ・こたつや布団に入れての使用、充電、放置
- ・車内など高温になる場所での使用、充電、放置

故障や事故の原因になります。



使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。

事故やけがの原因になります。

安全上のご注意

警告

電源について

-  ACアダプターのケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

ACアダプターのケーブルが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

-  お手入れの際は必ず動作が停止している状態で行ってください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。

火災やけがの原因になります。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

充電時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODEL No.	XH0500-3000LJJ
-----------	----------------

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

停電の時はすぐに電源を切ってください。

異常(故障)について

-  故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。事故やけがの原因になります。

その他

-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。



注意

ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

本体やマッサージ部の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。

事故や故障・けがのおそれがあります。

マッサージ部に勢いよく脚をおろしたりしないでください。

事故や故障・けがのおそれがあります。

低温やけどをおこすおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用

「低温やけど」について

比較的低い温度（40℃～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛い
の自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。



ヒーターを使用するときは熱くなるため、熱に敏感でない人や、熱に弱い人は十分注意を払ってください。

使い始めは5分程度をめどに弱い刺激でご使用ください。

初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用は15分以内とし、1日の使用は30分以内を目処にご使用ください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

マッサージの刺激が強すぎると感じた時は、弱く当ててください。

強い刺激のままで使用を続けると、皮膚や筋肉を痛めるおそれがあります。

使用中、肌に赤みが出た際は使用を中止してください。

刺激が強い可能性があります。タオル等をあてがいご使用してください。

梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください


- 本体
- ACアダプター
- 二股USBコード
- 指圧パーツ (ポイント型が2個本体に付いた状態です。)

各部の名称


本体

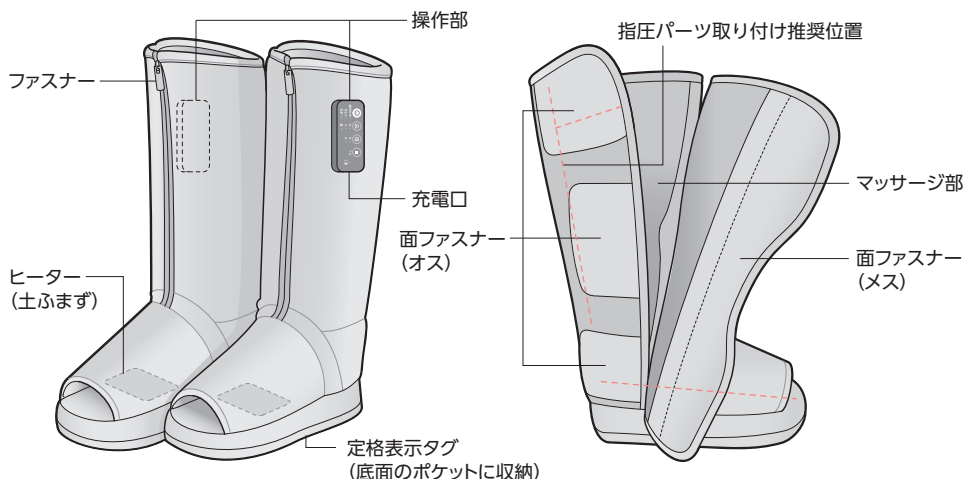

操作部

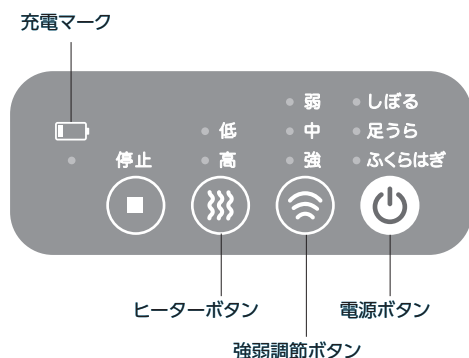

付属品

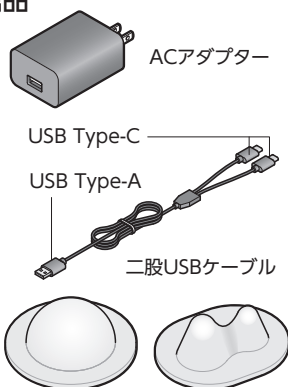

2種類の指圧パーツ

ドーム型：4個

ポイント型：4個


※ポイント型は2個本体に付いた状態です。

ご注意 使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の生地破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に操作部の各ボタンや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。
- 商品に大きな荷重がかかるような使い方をすると、保護装置が作動し動作が止まる場合があります。停止した場合は、しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作させてください。



マッサージ部
 生地破れがないか
 確認してください。

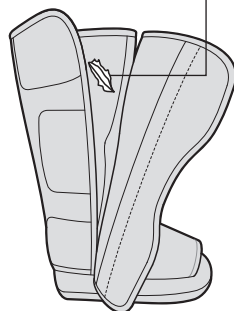

ご使用前の準備(充電する)


初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。

1 接続する

- ①二股USBケーブルのType-Cジャックを両足共それぞれの充電口に差し込みます。
- ②二股USBケーブルのType-AジャックをACアダプターに差し込みます。
- ③ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※根元まで確実に差し込んでください。

※本商品のACアダプターは5V3Aです。市販のACアダプターを使用しないでください。

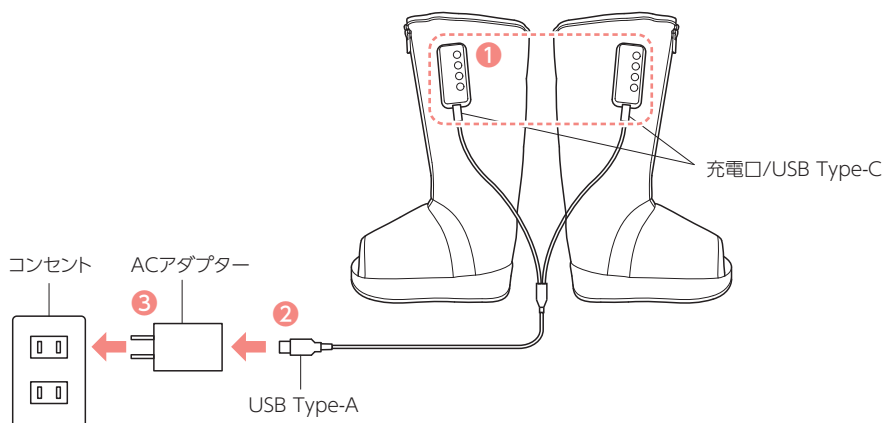

2 充電する

充電中、充電マークのLEDが白色に点滅します。
白色の点滅から点灯になると充電完了です。
二股USBケーブルを本体から抜いてください。
※充電中はご使用いただけません。

- 約4時間の満充電で、約1.5時間使用できます。
- ※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。
- ※高い周囲温度の中で充電を行うと保護装置が働き、充電が途中で止まる場合があります。

充電マーク




充電マークLED

点滅：充電中

点灯：充電完了

3

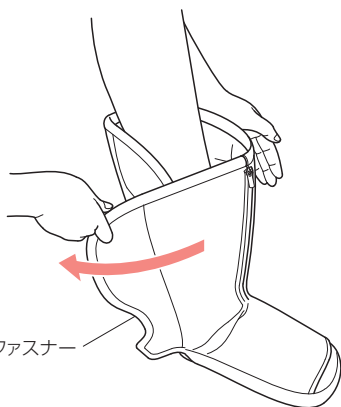


装着する(初めて使うとき)

- ① 前側のファスナーは締めたまま、面ファスナーを外して片足ずつ本体の奥まで足を入れます。

適応サイズ

足：約 28cm 以下


ふくらはぎ周囲：45cm 以下

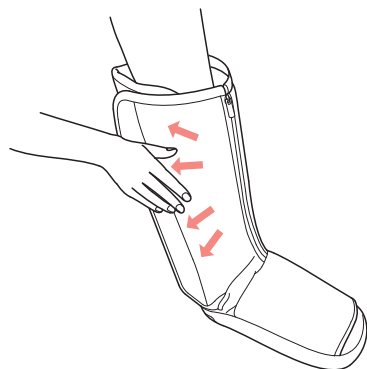

- ② 面ファスナーを締めてください。

面ファスナーが浮かないようにふくらはぎに沿って固定する。


4

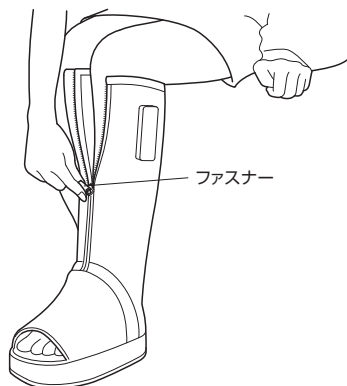

装着する(2回目以降)

3の「装着する」で自分サイズが決まるので、2回目以降はファスナーでラクに着脱できます。違う人が使う場合や、少しサイズが違っていると感じの場合は、再度面ファスナーで装着して調節してください。

5

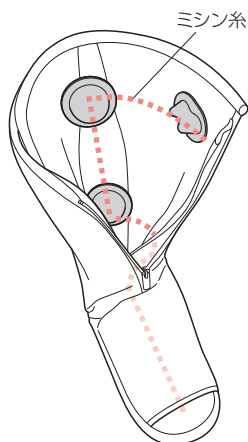

指圧パーツを使う場合

指圧パーツを使うと、より強いマッサージを体感できます。ミシン糸が突起の中央にくるように貼り付けるのが推奨の位置ですが、お好みの位置に貼り付けてご使用いただけます。

※出荷時にポイント型が2個本体に付いた状態です。

お好みの位置に取り付けたり、外したりできます。

※骨が当たる箇所は避けてください。

※痛いと感じる場合はすぐに使用を中止してください。


指圧パーツ	形状	どんな体感
ドーム型		柔らかくクッション性がある
ポイント型		硬くてしっかり

6 使用例

コードレスで左右独立しているので自由なポーズでご使用いただけます。



椅子などに座って使用する

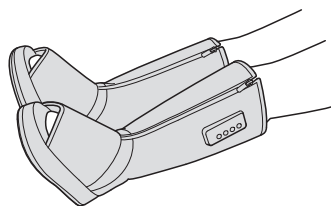

横になって使用する

マッサージをする

1 操作部の電源ボタン (⏻) を長押しして動作を開始

両足とも押してください。

まずは「しぼる」でマッサージを開始します。

電源ボタンを押してコースを変更することが可能です。

コースは3種類あります。選んだコースの表示ランプが点灯します。



コース名	こんなときに	マッサージ内容
しぼる	座りっぱなし、立ちっぱなし など運動不足の時に	足先からふくらはぎまで順番に 加圧する血行促進コース
足うら	たくさん歩いたり足うらに 疲労を感じる時に	足うらやかかとをもみほぐす疲労 回復コース
ふくらはぎ	運動後の疲労を感じる時に	ふくらはぎを加圧したりもみほぐす 疲労回復コース

2 強弱調節ボタン (⊞) を押して強さを調節する

まずは「中」の強さでマッサージを開始します。

強弱調節ボタンを押して強さを変更することが可能です。

選んだ強さの表示ランプが点灯します。

※使い始めは弱で使用し、使い慣れたから強さを調節してください。

※マッサージの途中でも変更できます。



※左右独立しているので、操作するときは両足ともボタンを押してください。

3 ヒーターを使うときはヒーターボタン を押す

マッサージを開始したときはヒーター OFFの状態です。

お好みでヒーターが使えます。

ヒーターの温度は「低」、「高」から選ぶことができ、選んだ方の表示ランプが点灯します。

※使い始めは低で使用し、慣れてから高低を調節してください。

※ヒーター単独で使用することも可能です。

※マッサージの途中でも変更できます。



※左右独立しているので、操作するときは両足ともボタンを押してください。

4 終了するとき

①途中で終了するときは停止ボタン  を押す。

②タイマーについて


電源を入れてから15分で自動的に停止します。

※左右独立しているので、操作するときは両足ともボタンを押してください。

5 充電が必要なとき

USBケーブルをつないでいないのに操作部の充電マークのLEDが点滅しているときは充電残量が減っているので6ページの ①「接続する」の方法で充電してください。

充電マーク

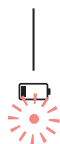



お手入れ

⚠ 警告

●お手入れは必ず動作が停止している状態で行ってください。

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きをしてください。
(絶縁劣化防止のため)
- 3ヶ月に一度の目安で充電してください。
(長期間充電しないと、充電機の機能低下・故障の原因となります。)



保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 保管の際は、製品に異常がないか定期的に点検してください。
- 長期間ご使用にならないときは、フル充電の状態で、できるだけ常温(10℃～30℃)で保管ください。
- コード類はねじれをほどこいて保管ください。
- お使いにならない場合でも、3ヶ月に一度の目安で充電してください。
(長期間の放置は、充電機の機能低下や故障の原因となります。)

🗑 廃棄の時の充電電池の取り出しかた

充電電池の取り出しかた

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

⚠ 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

⚠ 注意


- 必ず本体からACアダプターを取りはずして分解してください。
- 充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使いきってください。

充電電池を取り出す

●この図は、製品を廃棄するための分解図であり、修理用の図ではありません。


1 カバーの底面を切り開く

ファスナーに沿ってカットしてください。

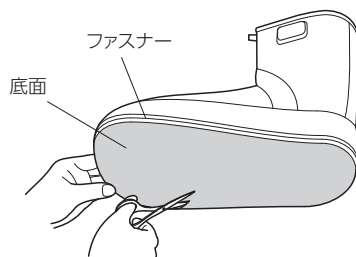


2 充電電池カバーを開ける

プラスドライバーで取り付けビス (8ヶ所) を外し樹脂カバーを取り外します。

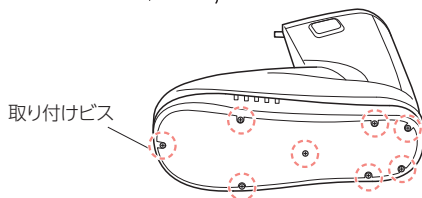

3 充電電池を取り出す

プラスドライバーで充電電池を固定している取り付けビス (2ヶ所) を外し充電電池を取り外します。コネクターコネクターを外し、充電電池を取り外します。コネクターは絶縁テープなどで絶縁して下さい。両足に充電電池が内蔵されていますので、同じ手順で両足とも行ってください。

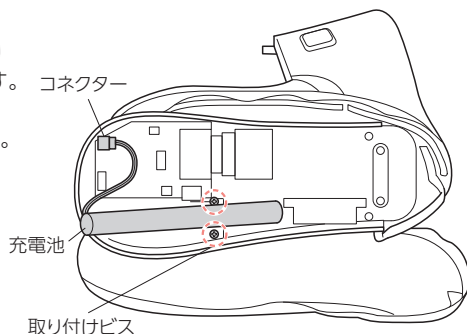

4 充電電池を廃棄する

取り外した充電電池はリチウムイオン電池回収協力店にお持ちください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度確認してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	正しく操作していますか？ →P.6～11の「使いかた」を再度ご確認ください。
	充電量不足ではありませんか？ →充電してください。
運転中に停止した	連続で使用していませんか？ →連続で使用するとモーターの温度が上昇し、保護装置が働きます。少し時間をあけてからご使用ください。
	充電量不足ではありませんか？ 動作中に充電マークのLEDが点滅していませんか？ →充電してください。
	電源ボタンを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。電源ボタンを長押しすると運転を再開します。
異音がする音が大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
充電できない	ACアダプター、USBケーブルを正しくつないでいますか？(P.6参照)
	長期間保管し、電池が放電しきっていませんか？ 完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電してください。
	高温時や低温時は充電できないことがあります。 常温の場所で充電してください。

警告

- 絶対に分解したり修理改造は行わないでください。
異常動作をしてケガや事故の恐れがあります。

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用エアマッサージ器 (JMDNコード 34663000)
販売名	フットマッサージャー P61
商品番号	AX-HP361
医療機器認証番号	306AABZX00014000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用する事。 ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
電気定格(片足)	DC7.4V 13W (ヒーター 3W)
アダプター定格	入力：AC100-240V 50/60Hz 0.5A、出力：DC5V 3A
タイマー	15分自動オフ
ヒーター温度	低：約41℃ 高：約45℃ (室温25℃)
適応サイズ	足：約28cm以下 ふくらはぎ周囲：45cm以下
使用電池	DC7.4V 2000mAh
充電所要時間	約4時間
連続使用時間	約1.5時間
製品サイズ(片足)	本体 (約) W110×L290×H460 (mm)
製品重量(片足)	約1kg (ACアダプター含まず)
素材	本体：ABS樹脂、ウレタンフォーム、ポリエステル等
生産国	中国
製造業者	XIAMEN COMFIER TECHNOLOGY CO.,LTD. (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「フットマッサージャー P61」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。

お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



ATEX

株式会社 アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	フットマッサージャー P61 / AX-HP361		
お買上げ年月日★	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所		
	TEL: () -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※【ご相談窓口における個人情報の取扱いについて】

株式会社アテックスおよび関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。またご相談内容は録音させていただく場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://www.atex-net.co.jp/privacypolicy/> をご参照ください。

 株式会社 アテックス
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス

0120-486-505

受付時間 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)