

ATEX LOURDES

ゆるりらクッション

品番

AX-HX330



ゆるりらクッション

目次

△ 安全上のご注意	1～3	🔧 故障かなと思ったら	10
🔍 梱包内容と各部の名称	4	⚙️ 仕様	10
👤 使いかた	5～7	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙
🧼 お手入れ	8～9		

このたびはAX-HX330をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

警告

症状について



次の人は使用しないでください。

- ・自分で意思表示のできない人や身体が利かない人及び幼児、小児
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・睡眠薬等を服用した人及びめいてい状態の人
- ・耳に疾患のある方、耳周りにトラブルがある方



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・悪性腫瘍のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人
- ・その他、医療機関で治療中の人
- ・けんしょう(腱鞘)炎の人

使用によって発しん(疹)、発赤などの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。健康を害するおそれがあります。

充電池について



本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温、低温下での充電、使用、放置をしないでください。

発熱、発火、破裂の原因になります。

ご使用について



お子様に使用させないでください。

事故やけがの原因になります。

飲酒、食事直後の約30分～1時間のご使用はさけてください。

健康を害するおそれがあります。

連続で長時間使用しないでください。

低温やけどのおそれがあります。

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いといった自覚症状がない場合でもやけどします。長時間同じ場所に当て続けしないでください。

本体を水につけたり水洗いしないでください。

感電・ショート・発火・故障などの原因になります。

使用時には強く押しあてすぎないでください。

けがや破損の原因になります。

高温のところで使用しないでください。

発火や発熱、やけどの原因になります。

運転中は使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やケガの原因になります。



乳幼児・小児などの誤飲にご注意ください。

事故やけがの原因になります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やケガの原因になります。

熱すぎると感じたときや違和感や異常を感じたらすぐに使用を中止してください。

・冬場など身体が冷えた状態で使用する際も、熱刺激が過敏に感じる場合

・温度「高」で熱く感じる場合は「低」でご使用ください

故障が発見された場合はお客様で修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元カスタマーサービスに連絡してください。

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

商品は、定期的に点検してください。

事故やけがの原因になります。

電源について



USBコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

ショート・故障の原因になります。

安全上のご注意

電源について(つづき)



USBコードや電源プラグなどが傷んだり、差込みがゆるいときは使用しないでください。
ショート・火災の原因になります。

USBコード端子にピンやゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ずUSBコードを抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
けがの原因になります。



USBコードを抜くときは、コードを持たずに端子部分本体を持って引き抜いてください。
ショート・発火の原因になります。

異常(故障)について



故障を発見したときはすぐに使用を中止してください。
事故やけがの原因になります。

その他



改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。(廃棄時を除く)

火災・感電・けがの原因になります。



ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

付属のUSBアダプター以外は使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

MODEL No.	XH0500-3000LUJ
-----------	----------------



使い始めは温度「低」でご使用ください。

初めから刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用はヒーター 60分、振動10分、1日の使用は1日2回以内にしてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

保管について



直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど、高温のところでは保管しないでください。
火災・故障の原因になります。

🔍 梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

— 開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください —

- 本体
- ACアダプター
- USBコード


各部の名称

本体

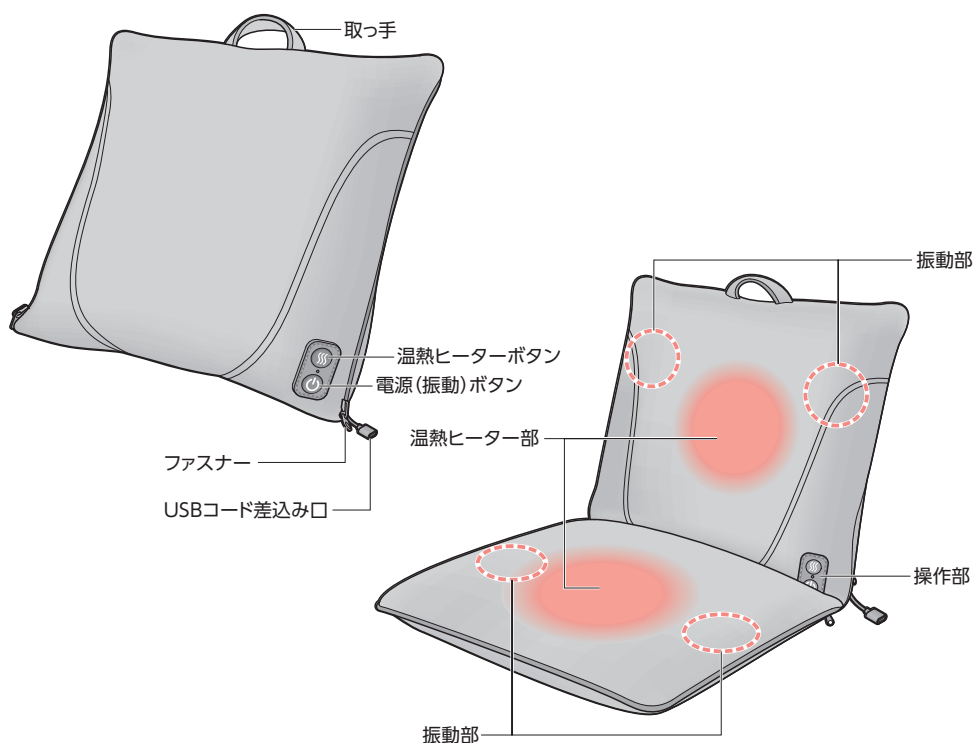


付属品

ACアダプター

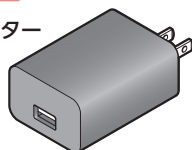

USBコード

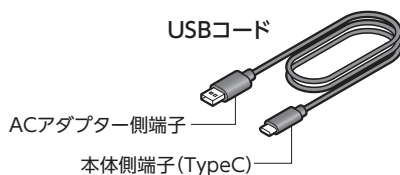

ご使用前の準備

1 電源と本体をつなぐ

- ① USBコードの本体側端子をUSB差し込み口に差し込みます。
- ② ACアダプター側端子を付属のACアダプター (DC5V3A) に差し込みます。
- ③ ACアダプターをコンセントにまっすぐ奥まで差し込みます。




⚠ 注意

- 市販のACアダプターやモバイル充電器ではご使用しないでください。
動作できない場合や故障の原因になります。

2 使用方法


使用したい部位によってファスナー開閉により形態を変えてご使用ください。

●ファスナーを3辺開いて使う お尻～腰

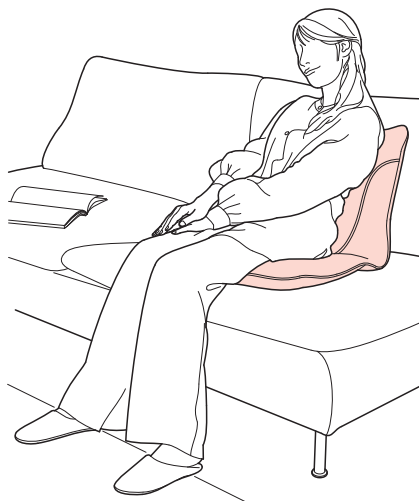

※椅子や床が固い場合、振動ユニットが違和感を感じることがあります。

●2辺開いて使う お腹や手

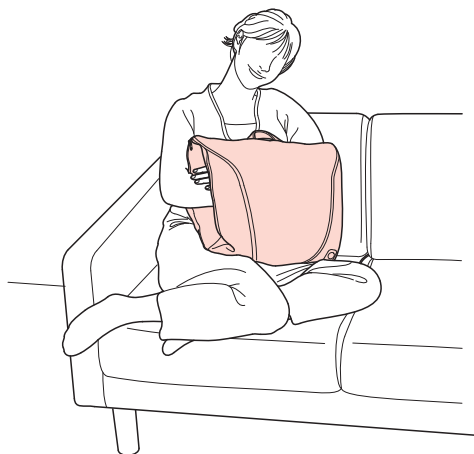

※クッションの内側(イラストの手を入れている方)にはヒーターがありません


●1辺開いて使う 足



※クッションを裏返して
ヒーター部(操作部がある面)を内側にする

※使用していると中身のクッションがズレてくることがあります。
ズレた場合、8ページの要領でカバーのファスナーを開け、クッションとカバーの角を合わせてください。

操作のしかた

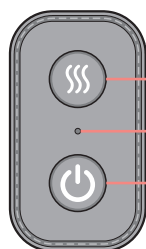

1 温熱ヒーターボタン

LED

2 振動ボタン

1 振動ボタン

押す回数で振動モードを変えることができます。
振動動作中はLEDが緑に光ります。

押し回数	モード	説明	イメージ
1回押し	リフレッシュ	短くテンポのある振動。 仕事や運動の後に。	
2回押し	呼吸	深呼吸のようなリズム。 リラックスタイムに。	
3回押し	ゆらぎ	波のようなリズムで 心地よく。寝る前に。	

2 温熱ヒーターボタン

押す回数で設定温度を変えることができます。
設定温度によりLEDの色が変わります。

押し回数	温度	設定	LED色
1回押し	低	約42°	オレンジ
2回押し	高	約47°	赤

※振動と温熱ヒーター両方使う場合は、温熱ヒーターのLED色が優先されます。

3 終了する

- 動作開始から自動OFFタイマーが働き、振動は10分、温熱ヒーターは60分で自動的に止まります。
- 途中で停止する場合は振動は4回押し、温熱ヒーターは3回押しで停止します。



お手入れ

⚠ 警告


●必ず電源が「切」の状態で行ってください。

- 本体はやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水没させたり、水を直接かけて洗浄を行わないでください。


外カバーの洗濯のしかた

●カバーが汚れた場合外カバーのみ洗濯することができます。

1 カバーの内側にあるファスナーを開く

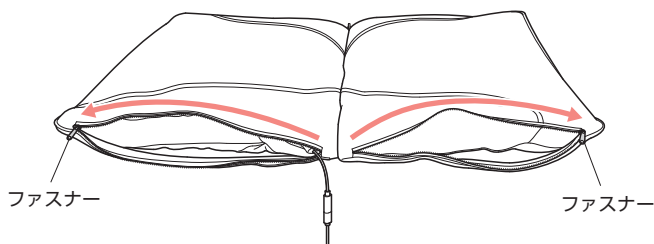


2 操作部とカバーを固定する面ファスナーを外す

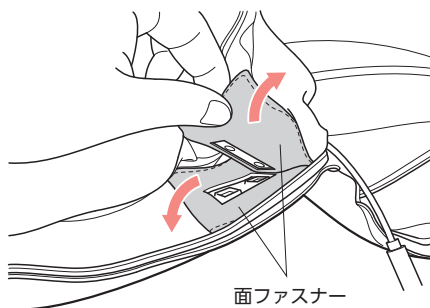




お手入れ

3 2つのクッションを連結しているコードを①②の順番に外す

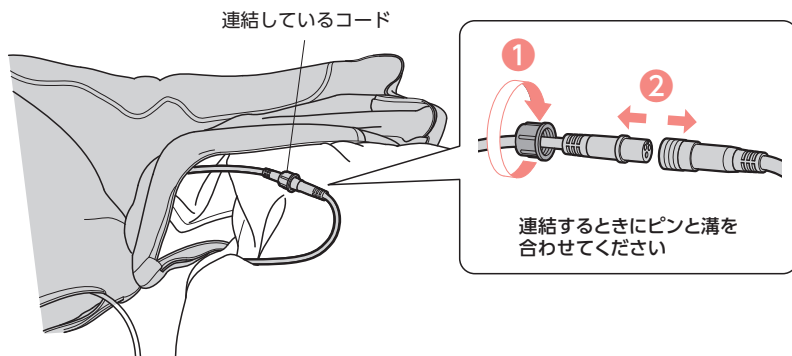


4 クッションを取り出す

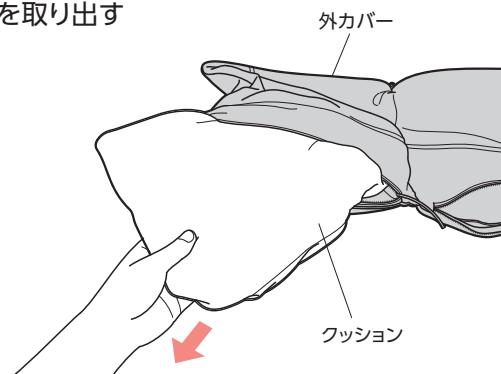

5 外した外カバーを洗濯する

外カバーに縫い付けている洗濯表示に従って洗ってください。
洗濯後は、シワをのばし日陰に干します。
カバーを被せるときは逆の要領で被せてください。

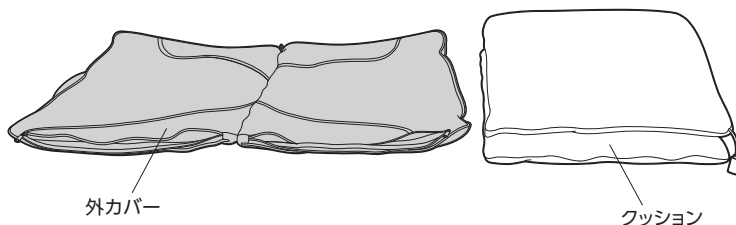

⚠ 注意

- クッションは洗濯できません。

故障かなと思ったら

警告

- 改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理しないでください。

修理に出す時に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に依頼してください。

絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

温かにならない	LEDはオレンジか赤に光っていますか？ 温かくなるまでに時間がかかります。
使用中に温度が下がる	温度調節のため、一定温度でON/OFFを繰り返します。
途中で停止する	電源がオンになってから振動は10分、ヒーターは60分経過すると自動タイマーで電源がオフになります。

仕様

販売名	ゆるりらクッション
商品番号	AX-HX330
電気定格	DC5V 3A
製品サイズ	約W400×L400×H150 (mm)
製品重量	約1kg
振動回転数	最大約4900回転/分
タイマー	振動10分、ヒーター 60分
素材	本体：ABS樹脂、ポリエステルなど
ヒーター温度	低約42℃、高約47℃ ※環境温度25℃時(温度の目安)
生産国	中国
製造販売元	株式会社 アテックス

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ゆるりらクッション」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。

お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社 アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	ゆるりらクッション / AX-HX330		
お買上げ年月日★	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所		
	TEL: () -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 3 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 4 保証書の再発行はいたしません。
- 5 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※【ご相談窓口における個人情報の取扱いについて】

株式会社アテックスおよび関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。またご相談内容は録音させていただく場合があります。なお、個人情報をご適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報の取扱いの詳細については、<https://www.atex-net.co.jp/privacypolicy/> をご参照ください。

株式会社 アテックス
<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス
0120-486-505

受付時間 平日10:00～12:00 / 13:00～17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

HX330-01-240702