

取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号

ATEX LOURDES

ルルドガン モバイル

品番 AX-HX458



目次

⚠ 安全上のご注意 …… 1 ~ 4	📁 保管について …… 15
🔍 梱包内容と各部の名称 …… 5	🔧 故障かなと思ったら… 16 ~ 17
👤 使いかた …… 6 ~ 14	⚙ 仕様 …… 18
🧼 お手入れ …… 15	💖 保証とアフターサービス… 裏表紙

このたびはAX-HX458をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、
大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。



⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容が無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

⚠ 警告

症状について



次の方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

・医師からマッサージを禁じられている方

例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。けがの原因になります。



次のような方は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方

・悪性しゅよう (腫瘍) のある方

・心臓に障害のある方

・温度感覚喪失が認められる方

・妊娠初期の不安定期または出産直後の方

・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある方

・皮膚に創傷のある方

・安静を必要としている方

・体温38℃以上 (有熱期) の方

例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき

・骨粗しょう症の方、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の方

・背骨に異常のある方または、背骨が曲がっている方

・けんしょう (腱鞘) 炎の方

・その他、医療機関で治療中の方

使用中、身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止してください。健康を害するおそれがあります。

症状について



幼児やお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。

使用前に必ず、本体やシリコンヘッドに破損がないか確認し、破損がある場合は使用しないでください。故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店またはカスタマーサービスに連絡してください。

事故やけがの原因になります。

骨部・のど・胸部・皮膚の弱い部分には使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の運動器や美容器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

使用部位に装身具をつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

本体をこたつの中に入れて使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

振動部にピンや針金など鋭利な物を入れたり刺したりしないでください。

故障やけがの原因になります。

高温のものや火気の近くでは使用しないでください。

変形や故障の原因、発火のおそれがあります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。



ご使用の前に振動部が正しく動作するか確認してください。

事故やけがのおそれがあります。

しばらく使用しなかった場合は機器が正常に、かつ安全に作動することを確認してください。

事故やけがの原因になります。

ヒーターを使用するときは熱くなるため、熱に敏感でない方や、熱に弱い方は十分注意を払ってください。

「低温やけど」について

比較的低い温度 (40℃ ～ 60℃) でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛い self覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

⚠ 安全上のご注意

ご使用について

- ❗ 本製品は手に持って使用することを意図して作られています。必ず手に持って使用してください。
事故やけがの原因になります。
振動部に負荷のかかる状態で放置しないでください。
事故や故障の原因になります。

電源について

- ⊘ ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
USB端子に金属やゴミを付着させないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

異常(故障)について

- ❗ 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。
故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店またはカスタマーサービスに連絡してください。
事故やけがの原因になります。

その他

- ⊘ 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店またはカスタマーサービスに連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 注意

ご使用について

- ⊘ 本体に強い衝撃や荷重をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。



本体に強い衝撃や荷重をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

振動部を強く引っ張らないでください。振動部が外れるおそれがあります。

事故やけがの原因になります。

浴室などの湿度の高いところでは使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

使い始めは弱い刺激でマッサージしてください。

初めからマッサージの刺激を強くすると健康を害するおそれがあります。

体や手が濡れている状態で触れないでください。

故障や事故の原因になります。

本製品は防水仕様ではありませんので、水のかかる場所や湿気の多い場所での保管はお避けください。

感電やけがの原因になります。

強く押して使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

強い衝撃や無理な力を与えないでください。

故障や事故の原因になります。

骨部やまたは皮膚の弱い部分には使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

磁気の受けるもの(磁気カード、時計、精密機器)には近づけないでください。

本製品には、ふたに磁石を使用しています。

1回の使用は5分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は、1分以内にしてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。



ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

事故やけがの原因になります。

本製品は、定期的に点検してください。

事故やけがの原因になります。

使用中、本体とダイレクトヘッドの間に指がはさまれたり、髪が巻き込まれたりしないようにしてください。

事故やけがの原因になります。

ヒーター使用時は、同じ箇所への連続使用は避け、十分注意してご使用ください。

やけどの原因になります。

梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください


- 本体（ストラップ付）
- USBケーブル
- 取扱説明書

各部の名称


本体

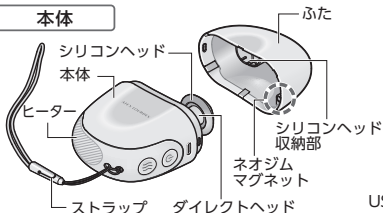


付属品

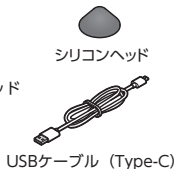

操作部

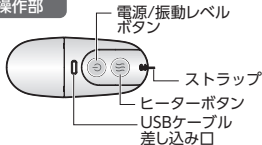

ヒーター部

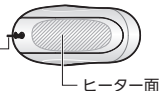

※振動とヒーターは同時に使用できません。

人 使いかた


ご使用前の準備

充電する際は、本体の電源をオフにしてからおこなってください。

充電する


1 本体とUSBケーブルをつなぐ

- ① 本体底部のUSBケーブル差し込み口に付属のUSBケーブルのType-C側を接続します。
※奥までしっかり差し込んでください。
- ② USBケーブルのType-A側を市販のACアダプター (DC5V 2A) のUSBポートに接続します。

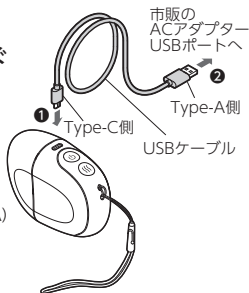

2 充電を開始する

充電中は電源/振動レベルボタンがゆっくり赤色点滅します。充電が完了すると電源/振動レベルボタンが消灯します。

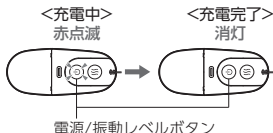

3 本体をACアダプターから取り外す

USBケーブルを本体とACアダプターの両方から外してください。

人 使いかた

⚠ 注意

- 充電中は動作しません。
- 充電する前に本体・USBケーブルに破損がないか確認してください。
- USBケーブルを接続する際は、奥までしっかりと挿し込んでください。
- 市販のACアダプターは出力5V 2Aを使用してください。
- 満充電しても使用時間が短くなった場合、充電電池の寿命と考えられます。
- 月に一回は動作させて、充電を行ってください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることもあります。

充電時間と動作時間の目安

※約1kgの負荷をかけた状態で使用した場合の動作時間を記載しています。

充電時間	動作時間（負荷状態）	ヒーター時間
約1.5時間	振動レベル1：約2.5時間 振動レベル2：約2.0時間 振動レベル3：約1.5時間	ヒーター弱：約8.0時間 ヒーター強：約6.5時間

※使用時に強い負荷を長時間かけ続けると、通常より早く電池がなくなります。

※充電時間は、市販のACアダプター（出力5V 2A）を使用した場合です。

※本体使用中に充電残量が不足すると、電源/振動レベルボタンが各レベルの色ではやく点滅します。その際は充電してください。

※ヒーター使用中に充電残量が不足した場合も、各レベルの色ではやく点滅しますので、充電してください。


※急速充電用の市販ACアダプター（PD規格準拠等）を使用しても充電時間は早くなりません。

操作のしかた

振動を使う

※ヒーターと同時に使用できません。

1 ふたを外す

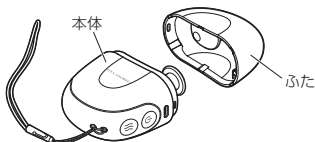

2 シリコンヘッドを取り付けて使用する またはダイレクトヘッドのみで使用する

電源がオフの状態になっていることを確認してから取り付けます。



人 使いかた

取り外しかた

シリコンヘッドを指でつまみながら外側に引っ張ると外れます。



POINT

- シリコンヘッドとダイレクトヘッドがあります。



シリコンヘッド

足裏、手のひら、肩、背、腰などのピンポイント部位へ使用します。



ダイレクトヘッド

弾力性のない面タイプで直接各部位へアプローチできます。

3 ストラップに手を通す

ストラップに手を通し、本体が安定して使用できる状態にしてください。
※ご使用の際は、必ずストラップに手を通してからご使用ください。



POINT

- ストラップの長さは調整できます。



4 電源を入れる

電源/振動レベルボタン(⏻)を約1秒間長押しすると、電源が入り振動レベル1で開始します。
電源/振動レベルボタン(⏻)を押すごとに振動レベルが1→2→3と切り替わり、レベル3の状態ですらに押すと停止します。再度長押しすると、レベル1から再開します。

お好みの振動レベルでご使用ください。




動作中、強い力でダイレクトヘッドを押し当て続けると止まります。そのとき電源/振動レベルボタン(⏻)が赤点滅しますので、再スタートする場合は、電源/振動レベルボタン(⏻)が赤点滅して約10秒以内に電源/振動レベルボタン(⏻)をもう一度押してください。

※約5分間で自動タイマーが作動します。

POINT

- 振動レベルは「電源/振動レベルボタン」で確認できます。
例えば橙点灯していると、振動レベル2に設定されています。

電源/振動レベルボタン

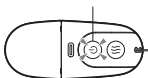

振動レベル	電源/振動レベルボタン	振動回数(約)
1	(⏻) 白点灯	1900回/分
2	(⏻) 橙点灯	2300回/分
3	(⏻) 赤点灯	2700回/分

使いかた

5 振動を終了する

振動をオフにするには、電源/振動レベルボタンを約1秒間長押ししてください。

または、電源/振動レベルボタンを数回押すことで停止できます。
押す回数は、使用中の振動レベルによって異なります。

6 ふたを閉める

※ふたを閉めた状態では、電源/振動レベルボタンを長押ししても動作しません。

注) 電源/振動レベルボタンが一度点滅しますが動作しません。

※ヒーターボタンはふたが閉まった状態でも動作します。



注意

- 水につけること、浴室での使用、水洗いはしないでください。
- 骨部または皮膚の弱い部分には使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

ヒーターを使う

※振動と同時に使用できません。


1 ストラップに手を通す

ストラップに手を通し、本体が安定して使用できる状態にしてください。
※ご使用の際は、必ずストラップに手を通してからご使用ください。



2 ヒーターを入れる

ヒーターボタン(🌀)を約1秒間長押しすると、ヒーターがオンになり「弱」から開始します。ボタンを押すごとに「弱 → 強 → オフ」と切り替わります。お好みのヒーターレベルでご使用ください。

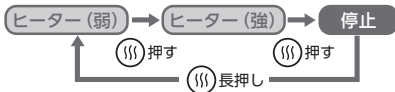

※約5分間で自動オフします。

※ふたをしめた状態でもヒーターは使えます。

POINT

- ヒーターレベルは「ヒーターボタン」で確認できます。
例えば赤点灯していると、ヒーター (強) に設定されています。

ヒーターボタン



ヒーターレベル	ヒーターボタン	ヒーター温度
弱	🌀 橙点灯	約42℃
強	🌀 赤点灯	約46℃

使いかた

3 ヒーターを終了する

ヒーターをオフにするには、ヒーターボタンを約1秒間長押ししてください。

または、ヒーターボタンを数回押すことで停止できます。

押す回数は、使用中のヒーターレベルによって異なります。

約5分間で自動オフします。



注意

- 水につけること、浴室での使用、水洗いはしないでください。
- 骨部または皮膚の弱い部分には使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

使用例

POINT

- 各部位に振動を加える前に、お好みに応じてヒーターで温めることができます。温めた後、好みの振動レベルで使用することで、心地よくお使いいただけます。



首～肩

- △ シリコンヘッド
- ☐ ダイレクトヘッド



腕

- ☐ ダイレクトヘッド



脚 (ふともも)

- ☐ ダイレクトヘッド



脚 (ふくらはぎ)

- ☐ ダイレクトヘッド



足裏

- △ シリコンヘッド
- ☐ ダイレクトヘッド



お手入れ



警告 ●必ず電源がオフの状態で行ってください。

- 本体はやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水没させたり、水を直接かけて洗浄を行わないでください。



保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- ケーブル類はねじれをほどこいて保管してください。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。



注意 ●廃棄の際、充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して充電電池を使い切ってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度確認してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解や修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

症状	原因・対処
動かない	電源/振動レベルボタンを長押ししましたか？ ▶電源/振動レベルボタンを約1秒間長押ししてください。
	振動時にヒーターボタンを押しましたか？ ▶振動とヒーターは同時に使用できません。
	充電中は電源が入りません。 ▶充電が完了してから、または充電を中止してからお使いください。
	充電残量が不足していませんか？ ▶再度充電してください。(P.6参照)
振動が弱い	十分に充電されていない可能性があります。 ▶再度充電してください。(P.6参照)
	シリコンヘッド、ダイレクトヘッドを強く押し当てていませんか？ ▶強く押し当てると動作が止まります。
途中で止まる	電源がオンになってから約5分経過すると自動タイマーで電源がオフになります。 ▶故障ではありません。
	十分に充電されていない可能性があります。 ▶再度充電してください。(P.6参照)
	シリコンヘッド、ダイレクトヘッドを強く押し当てていませんか？ ▶強く押し当てると電源/振動レベルボタンが赤く点滅し、動作が止まります。

故障かなと思ったら

症状	原因・対処
音が大きい	本製品の動作音は構造上発生するものです。 ▶故障ではありません。
充電 できない	周囲の環境温度によって正常に動作しない場合があります。 ▶周囲の温度が5℃～35℃の環境下で充電を行ってください。
本体が 熱くなる	振動時、負荷の掛け方によって、本体が熱をもつ場合があります。 ▶故障ではありません。 しかし、異常に熱くなる場合は故障が疑われますので、カスタマーサービスにご連絡ください。
	連続使用すると本体が熱を持つ場合があります。 ▶熱くなったときは少し時間を空けてからご使用ください。

仕様

販売名	ルルドガン モバイル
商品番号	AX-HX458
定格電源	DC7.4V
消費電力	約11W
バッテリー	600mAh
製品サイズ	本体：(約) W72 × D40× H96mm
製品重量	約170g (ストラップは含まず)
素材	本体：ABS+PC シリコンヘッド：シリコン
振動数	レベル1：約1900回／分 レベル2：約2300回／分 レベル3：約2700回／分
ヒーター	弱：約42℃ 強：約46℃
タイマー	振動・ヒーター 5分自動オフ
生産国	中国

♡保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルドガン モバイル」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス
〒541-0058
大阪府中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 品番		ルルドガン モバイル/AX-HX458	
お買上げ年月日★		年 月 日	保証期間 お買上げ日より1年 本体
★ お客様	お名前		★ 販売店
	ご住所		
TEL: () -			

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱い上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 無料保証期間はご購入の日から1年です。
- 3 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 4 保証書の再発行はいたしません。
- 5 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※【ご相談窓口における個人情報の取扱いについて】

株式会社アテックスおよび関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。またご相談内容は録音させていただく場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報の取扱いの詳細については、<https://www.atex-net.co.jp/privacypolicy/> をご参照ください。



株式会社アテックス

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター

〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス

0120-486-505

受付時間 平日10:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

458-01-260708