



Air Massager

Rilagyo

ルルド エアマッサージャー リラギョ

AX-KXL4000

管理医療機器：家庭用エアマッサージ器



目次

⚠ 安全上のご注意	1 ~ 4
🗂 梱包内容と各部の名称	5
👤 使いかた	6 ~ 8
🧼 お手入れ	9
📦 保管について	9
🔧 故障かなと思ったら	10
⚙ 仕様	10
♡ 保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-KXL4000をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

⚠️ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味 表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号

⚠️ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・心臓に障害のある人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・体温38℃以上 (有熱期) の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- 例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・けんしょう (腱鞘) 炎の人
- ・その他、医療機関で治療中の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

事故や健康を害するおそれがあります。

使用について



幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

思わぬ事故の原因になります。

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合使用を中止してください。カバーを外した状態や破れた状態で使用しないでください。カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

首には使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

同時に複数の人が使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。

事故・感電・低温やけどのおそれがあります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

マッサージ部位にアクセサリーなど装身具をつけて使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。

電源について



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



停電のときはすぐに電源を切ってください。

感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

ACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ずACアダプター本体部を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

! 安全上のご注意

! 警告

電源について(つづき)



使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。
また、付属のアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODEL No. XH0500-1500W J

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

異常(故障)について



故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他



改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。

! 注意

ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。

本体の上に物を置いたり、荷重をかけたりしないでください。
また、本体の上に乗らないでください。
故障や事故の原因になります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。また、こたつの中で使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。

エアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。
けがや故障の原因になります。

本製品は片手・片足用です。両手・両足を入れて使用しないでください。
事故やけがの原因になります。



平らな場所に置いて使用してください。

故障の原因になります。

本体の手足の抜き差しは電源がOFFの状態でおこなってください。
故障やけがの原因になります。

緊急時や動作中に異常を感じたら、直ちにACアダプタープラグ
を本体から抜いてください。

事故やけがの原因になります。

1回の使用は5分以内とし、1日の使用時間は15分以内にしてくだ
さい。また、同一箇所への連続使用は避けてください。

長時間の連続使用は、けがの原因になります。

初めてご使用になるときは、弱モードで5分間使用し、問題がな
ければお使いください。

使い始めは弱モードでお使いください。

弱モードでも刺激が強すぎると感じる場合は、1回の使用時間を
2分程度を目処に短くしてください。

強い刺激のまま使用を続けると健康を害するおそれがあります。

その他



使用前には点検を行い、故障又は異常が認められた場合は、
お買上げの販売店、又は製造販売業者までご連絡ください。

事故やけがの原因になります。

電池の取扱いについて

- 単3形充電式ニッケル水素電池の使用をおすすめします。
- アルカリ乾電池でもご使用いただけますが、使用回数が少なくなることがあります。
- 電池切れ表示ランプが点滅したら専用充電器で充電するか、新しい乾電池にとりかえてください。
- ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池など）、マンガン乾電池は使用しないでください。
- 電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れによる機器の腐食や衣服や手を汚す原因となる場合があります。また、使用後の電池の廃棄についてはそれぞれの地域の条例に従ってください。
- 電池交換は4本を同時に行い新旧電池の混用や種類の異なる電池の併用は避けてください。
- 極性（プラス・マイナス）の向きを正しく入れてください。
- 使えなくなった電池は直に取り出してください。
- 漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い流して医師にご相談ください。
- 本製品では充電できません。充電式電池の充電には専用の充電器をご使用ください。
- 長期間使わないときは電池を本体から抜いてください。

🔍 梱包内容と各部の名称


梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に
以下のものが揃っているか確認してください

- 本体
- ACアダプター
- フェイスシール

各部の名称



前

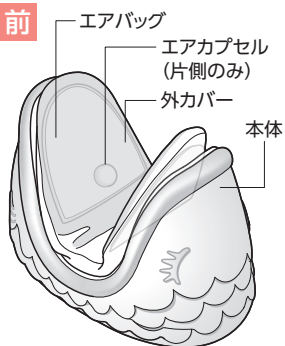


後



裏

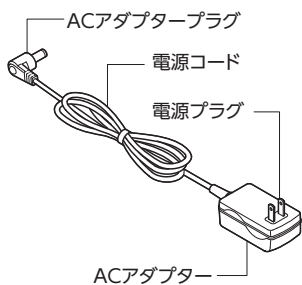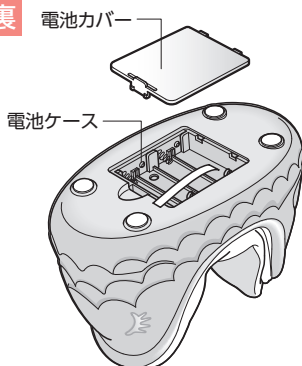

フェイスシール

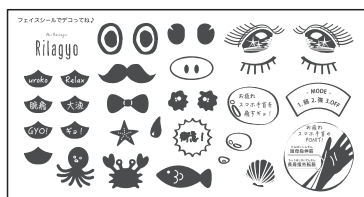

お好みで本体に貼り付けてお楽しみください。

⚠️ 注意 使用前の注意事項


- 縫製破れがないか確認し、破れている場合は使用しないでください。
 - 電源ボタンやタイマーが正常に動作するか確認してください。
 - しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、正常に動作することを確認してください。
- ➔ 異常がある場合は使用を中止し販売店に連絡してください。

ご使用前の準備

ACアダプターで使用するとき


1 ACアダプターのプラグを本体の差込口に接続する

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

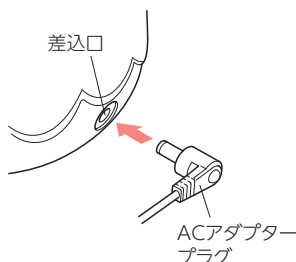


2 ACアダプターをコンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

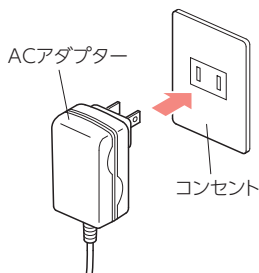


単3形電池で使用するとき

1 電池カバーをはずし単3形電池を4本入れる

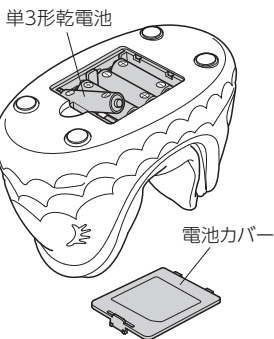

※乾電池には、+の極性があります。電池ケースの印字に従い、正しい向きで入れてください。

2 電池カバーを取り付ける

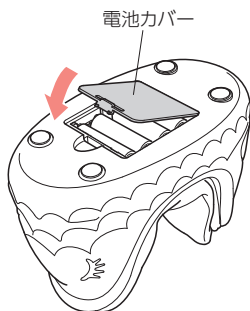

POINT

ACアダプターが接続され電池も入っている場合、ACアダプターが優先され電源となります。

マッサージをする

⚠️ 注意


●弱モードで5分間使用し、問題がなければお使いください。

- 使い慣れるまでは弱モードでご使用ください。
- 弱モードでも痛いと感じる時は使用時間を短くしてください。
- 1回の使用は5分以内とし、1日の使用時間は15分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。

1 本体にマッサージ部位を入れる


手首で使う

エアカプセル側が手首の内側になるように手首をセットします。

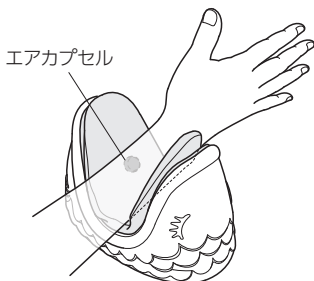


足首で使う

足首をセットします。

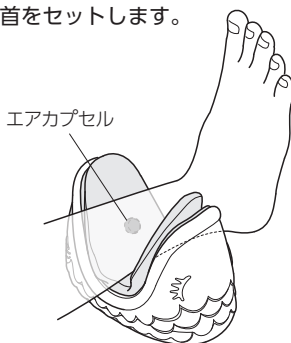


手のひらで使う

エアカプセルが手のひらにあたるようにセットします。

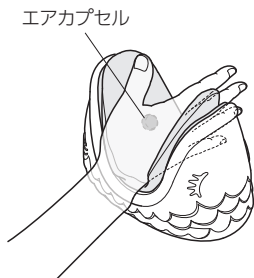

つちふまずで使う

エアカプセルがつつちふまずにあたるように足のうらをセットします。

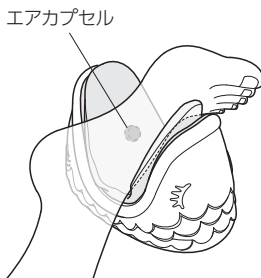

POINT

本製品には1ヶ所のエアカプセルが内蔵されています。
足や手を入れる位置を調整し、お好みのポイントでお使いください。

2 電源ボタン を押す

電源ボタンを1回押す

弱モードがスタートします
(LED緑点灯)




電源ボタンを2回押す

強モードがスタートします
(LEDオレンジ点灯)




※電源ボタンを押してから約5分経過すると自動的に電源が切れます。


※電源ボタン  を押すことで、使用中で動作を停止することができます。(下記参照)

※電池残量が少なくなるとLED (緑) が点滅します。電池を交換してください。

POINT

電源ボタン  を押すたびにモードが切り替ります。
強モードの後に電源が切れます。


ボタンを
押すたびに

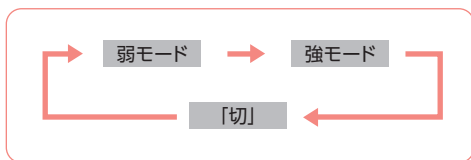

お手入れ


- 本体はやわらかい布でから拭きしてください。
- 本体の汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ（金属部分）をから拭きをしてください。（絶縁劣化防止のため）

警告

- 必ず電源が「切」の状態では電池を抜き、ACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

外カバーの汚れは、下記の要領で外カバーをはずし、洗濯絵表示にしたがって洗濯できます。

- ①本体から外カバーを取り外してください。
- ②外カバーにぬい付けてある洗濯表示にしたがって洗ってください。
- ③しわをのばして形を整えてから干し、よく乾かしてください。
- ④本体に外カバーを取り付けてください。

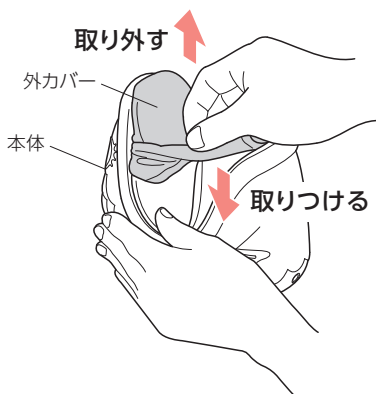

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

🔧 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に連絡してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	電池が正しく入っていますか？ 電池の⊕と⊖を確認してもう1度操作してください。
	操作ボタンは正しく動作していますか？
動作が弱い	電池残量が不足していませんか？ 電源ボタンが緑に点滅したら電池を交換するかACアダプターで使用してください。
運転中に停止した	電池残量が不足していませんか？ 電源ボタンが緑に点滅したら電池を交換するかACアダプターで使用してください。
	電源ボタンを押してから、約5分経過するとタイマー機能はたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 電源ボタンを押すと運転を再開します。
異音がる音が大きい	動作時の振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

🔧 仕様

類別	機械器具77 バイブレーター	
医療機器分類	管理医療機器	
一般の名称	家庭用エアマッサージ器 (JMDNコード34663000)	
販売名	ルルド エアマッサージャー リラギョ	
商品番号	AX-KXL4000	
医療機器認証番号	301AABZX00039000	
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 〔●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解〕	
使用電源	ACアダプター	AC100V 50/60Hz
	単3形乾電池	4本 DC1.5V×4本
定格消費電力 (ACアダプター使用時)	4.5W	
ACアダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 200mA 出力 DC5V 1.5A	
タイマー	5分自動オフ	
連続使用時間 (単3形乾電池使用時)	約2時間	
製品サイズ	(約) W175×L100×H130mm	
製品重量	約500g (アダプター含まず)	
素材	本体：ABS樹脂 エアバッグ：TPU 本体カバー・外カバー：ナイロン85% ポリウレタン15%	
生産国	中国	
製造業者	U Young Appliance Manufacturing (Xiamen) Co.,Ltd (中国)	
製造販売業者	株式会社アテックス	

♡保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド エアマッサージャー リラギョ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一破損した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料交換をお約束いたします。交換は必ず本書を添えてご依頼ください。

品名	ルルド エアマッサージャー リラギョ	型番	AX-KXL4000
お買上げ年月日*	年 月 日		
保証期間	お買上げ日より1年 本体		
★お客様	お名前		
	様		
★販売店	ご住所		
	TEL : () -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外 (例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載) に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。



株式会社アテックス

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター 〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)